

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 35517000

エスマルヒ開口器

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原材料：ポリカーボネート

3. 原理

円錐形状のものをネジのピッチを利用して奥へねじ込むことで隙間を拡大させる。

【使用目的又は効果】

遠位端は丸く、挿入して開孔するときに内腔、身体開口部又は管を拡張又は伸張することができる。検査又は他の器具の挿入時に用いる。通常、ステンレス製であるが、プラスチック製のものもある。

**【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 使用前に洗浄・消毒、必要に応じて滅菌する。最高 121℃までの高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
- 2) 尖先部を上、下歯の隙間に挿入する。
- 3) ハンドルを持って右回しに徐々にねじ込むことで、上、下歯の隙間が拡大、左にまわすと閉じる。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

過度の力でねじ込まないこと〔上歯、下歯に損傷を起こすことがある〕。

**【保管方法及び有効期間等】

有効期間

製造年月より 3 年〔自己認証(当社データ)による〕。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：ゲールメッド社 台湾

GaleMed Corporation