

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ－ 70469000

ロンシー固定キット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈併用医療機器〉

当社指定のロンシー固定システムとの組合せ以外で使用しないこと[相互作用の項参照]。

〈使用方法〉

再使用禁止、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真



ショルダーサスペンショントラップ

2. 原材料

フィンガートラップ：ポリエチレン

ショルダーサスペンショントラップ：ポリエチレンテレフタレート

3. 原理

手術等の際に、本品を併用するロンシー固定システムに接続して使用することで、患者の肩・腕・手指又はその関節等を張力により固定、保持することができる。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ－をいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

〈フィンガートラップ〉

- 1) 患者の指に本品を装着する。
- 2) 本品が指の全長をカバーしていることを確認する。
- 3) 本品のループ部分を軽く引っ張り、外れないことを確認する。
- 4) 本品のループ部分をロンシー固定システムに取り付ける。

〈ショルダーサスペンショントラップ〉

- 1) 本品に患者の腕を入れ、本品の上から固定用バンデージを手首又は前腕に巻きつけて固定する。

- 2) 本品のループ部分を軽く引っ張り、本品が腕から抜けないことを確認する。
- 3) 本品のループ部分をロンシー固定システムに取り付ける。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) ショルダーサスペンショントラップの上に巻く固定用バンデージは、強く巻きすぎないようにすること[血流を阻害するおそれがある]。
- 2) 固定用バンデージを手首又は前腕に巻きつける際は、固定用バンデージの端から約 15 cm の余裕を残し、この部分を伸ばしてしっかり固定すること。

3. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、「販売名：ロンシー固定システム」（届出番号：27B1X00024000145）と併用して使用する。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) フィンガートラップは患者に適したサイズを選択すること。
- 2) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように装着すること。

2. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定のロンシー固定システム以外の他社製品	機器に重要な損傷を与え、患者又は術者に重篤な障害をもたらす危険性がある。	本品との併用に関する安全性が確認されていない。

【保管方法及び有効期間等】

滅菌有効期限：包装に記載

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL:0725-53-5546



製造業者：ヒルロム社 メキシコ
Hill-Rom De Mexico S de RL de CV