

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

ポジショニングエイド (ii)

【禁忌・禁止】

当社指定の構成品以外の組合せで使用しないこと
[相互作用の項参照]。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状


代表的写真

クラムシェルパッド



アドバンスドアームボード

パッド

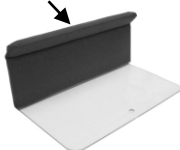

アームシールド

- 1) アドバンスドアームボード
適用患者体重：220kg 以下
アームボード長：430～610mm
- 2) アームシールド
適用患者体重：220kg 以下

2. 原材料

クラムシェルパッド表面：ポリウレタンコーティング
アームシールド用パッド表面：ポリウレタンコーティング

3. 原理

手術等の際に、本品を手術台に固定し使用することで、患者の体位を固定・保持することができる。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

〈アドバンスドアームボード〉

- 1) 使用前に、必要に応じて消毒剤で清拭する。
- 2) 本品をサイドレールに取り付ける。
- 3) クランプのハンドルをゆるめ、アームボードの高さ、サポートロッドの角度を調節して固定する。
- 4) アームボードクランプのハンドルをゆるめ、アームボードの位置、角度を調節して固定する。
- 5) アームボードエクステンションスリーブを引き、アームボードの長さを調節する。
- 6) 患者の腕をパッドの上に置き、クラムシェルパッドを巻いて固定する。

〈アームシールド〉

- 1) 使用前に、必要に応じて消毒剤で清拭する。
- 2) 本品を患者の腕の位置に合わせて手術台のパッドの下に差し込む。
- 3) 点滴ライン、血圧計用カフ等の挟み込みがないようにして本品の位置を調節する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 手術台のサイドレール又は手術台アクセサリのレール幅及び厚みに適正なアドバンスドアームボードを選択すること [本品はクランパー体型であるため]。
- 2) 患者の身体に負荷をかけるような動作、固定をしないこと。
- 3) アームシールドは、手術台を横転した際に患者の体重がかからないように設置すること [本品は、患者の体位を固定する(患者を支える)ものではないため]。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) アームシールドは、手術台のパッドの厚みが 10cm 以上ある場合は使用しないこと。
- 2) パッドはアルコール系消毒剤で清拭しないこと。
- 3) 適用患者体重を遵守すること [機器の破損や患者の脱落を起こすおそれがあるため]。
- 4) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように装着すること。
- 5) 手術台用クランプのサイドレール又は手術台アクセサリレールへの固定、各構成品の取付は確実にを行うこと。

2. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定の構成品以外の他社製品	機器に重要な損傷を与え、患者又は使用者に重篤な障害をもたらす危険性がある。	本品との接続に関する安全性が確認されていない。

*【保管方法及び有効期間等】

耐用期間 [自己認証（当社データ）による]

パッド：3 年

パッド以外：5 年

【保守・点検に係る事項】

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒する。
- 2) 各構成品は浸漬しないこと。
- 3) 各構成品は噴霧液で消毒、清拭しないこと。
- 4) 各構成品は滅菌しないこと。
- 5) 使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL 0725-53-5546

製造業者：ヒルロム社 メキシコ
Hill-Rom De Mexico S de RL de CV

