

機械器具 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

舌圧子(0914)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
代表的写真



2. 原材料：ステンレス鋼
3. 原理
先端の圧舌部で舌を圧迫固定することで、口腔、咽頭の視野を確保する。

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる器具をいう。

**【使用方法等】

1. 使用方法
 - 1) 使用前に、必ず洗浄・滅菌する。134℃/5分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
 - 2) 柄を握って操作する。
2. 使用方法に関連する使用上の注意
器具を保護する保守油が塗布されているので、適切な油除去を行ってから滅菌処理を行うこと [油が付着したまま高圧蒸気滅菌を行うと、器具が変色する可能性がある]。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒、滅菌
 - 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
 - 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する。
 - 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
 - 4) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
 - 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
 - 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
2. 点検
滅菌前、使用前に汚れ・破損・変形等を点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社
TEL 0725-53-5546
<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：ヒルブロ インストルメンツ社 パキスタン
Hilbro Instruments (Pvt) Ltd.