

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

S-V S チューブ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原理

吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって吸引する。

【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブをいう。吸引嘴管等との接続に用いる場合もある。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 使用前に、必要に応じて洗浄、滅菌する。134℃/10 分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
- 2) 必要な長さにカットし、吸引器、回収容器、吸引嘴管等の接続口に接続する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

使用中、適直接続状態を確認し、適切な処置を行うこと
[接続部の漏れ、ゆるみ、外れ、つまりのおそれがあるため]。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと [接合部が外れるおそれがあるため]。
- 2) 本品をアセトン、ベンゼン等の有機溶剤と接触させないこと [強度が低下し、亀裂が生じるおそれがあるため]。

2. その他の注意

- 1) 再使用する場合は、じゅうぶん洗浄し、必要に応じて滅菌すること。
- 2) 本品を吸引器、回収容器又は吸引嘴管等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。

**【保管方法及び有効期間等】

有効期間（耐用期間）

製造年月より 3 年 [自己認証（当社データ）による]。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：パシフィック ホスピタル サプライ社 台湾

Pacific Hospital Supply Co., Ltd.