

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

ハグユーバック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. ディスポカバーは再使用禁止。
2. 材質に過敏症がある患者には使用しないこと。
3. 当社指定の構成品以外の組合せで使用しないこと
[相互作用の項参照]。
4. ハイパーサーミア（温熱療法機器）と併用しない
こと [相互作用の項参照]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、ハグユーバック又はハグユーバック 側臥位用と、ディスポカバー（非医療機器）から構成される。

代表的写真

ハグユーバック

ハグユーバック 側臥位用



ディスポカバー
(単回使用)

適用患者：体重 220kg 以下、身長 200cm 以下
前腕部の体横幅 70cm 以下

2. 原材料

ハグユーバック：ポリウレタン
ハグユーバック 側臥位用：ポリウレタン
ディスポカバー：レーヨン、ポリエステル

3. 原理

ハグユーバック内部には小さな弾性ビーズが入っており、空気を抜くこと（陰圧）により弾性ビーズがかたまり、長時間同じ形状を保つことができる。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

*【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) バルブから安全ロックを外し、開放状態にした本品を手術台の上に設置して内部のビーズを全体に均等にならす。
- 2) ストラップを手術台のサイドレールに固定し、本品が手術台の中心にくるようにする。
- 3) 本品の空気を少し吸引し、内部のビーズが全体に均等にならされた状態にする。

- 4) 内部のビーズが自由に動かなくなり、少しかたくなるまで空気を抜いてバルブを閉じる。
- 5) ディスポカバーを取り付ける。
- 6) 患者を本品に乗せ、患者の位置を調整する。
- 7) バルブを開放し、吸引器又は吸引ポンプ等をバルブに取り付けて吸引を開始する。
- 8) 体位保持に適しなかつたさになるまで吸引し、バルブを閉じてロックする。
- 9) 使用後は、安全ロックを外してバルブを開き、本品を手術台から取り外す。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 使用前に、表面にピンホールや破れがないか、バルブ、送気球、ストラップに破損がないか確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。
- 2) 頭低位で使用する場合は、必ずショルダーサポートを併用すること（側臥位用は除く）。
- 3) 患者の血圧測定用カフや点滴ライン等に干渉しないように注意して設置すること。
- 4) 体位保持に適したかたさ以上に空気を抜かないこと
[皮膚障害の原因になる可能性がある]。
- 5) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように設置すること。使用中は、患者の身体に負荷をかけるような動作をしないこと。
- 6) 体位の変更は、本品がかたまっていない状態で行うこと。

3. 組み合わせて使用する医療機器

ハグユーバック（側臥位用は除く）は、ショルダーサポート「販売名：ポジショニングエイド 届出番号：27B1X00024000170」と併用できる。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 適用患者体重及び体型を順守すること [機器の破損や患者の脱落を起こすおそれがある]。
- 2) 本品で患者を押さえ過ぎないこと [褥瘡、血行障害、神経圧迫をもたらす可能性がある]。
- 3) 先端が鋭利なものを接触させないこと。

2. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定の構成品以外の他社製品	機器に重要な損傷を与え、患者又は使用者に重篤な障害あるいは死亡をもたらす危険性がある。	本品との併用に関する安全性が確認されていない。
ハイパーサーミア（温熱療法機器）	本品の材質が変形、変性する可能性がある。	本品との併用に関する安全性が確認されていない。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間：2年〔自己認証（当社データ）による〕。

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちにアルコール系消毒剤で湿らせた清潔な柔らかい布で清拭する。
- 2) 各部に破損等がないこと、本品を吸引してピンホールがないこと、バルブの開閉と送気球の機能が正常であることを定期的に点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL 0725-53-5546



製造業者：ヒルロム社 メキシコ
Hill-Rom De Mexico S de RL de CV