

機械器具 29 電気手術器
一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000

BONIMED バイポーラアダプター


**【禁忌・禁止】

1. 本品は滅菌しないこと〔破損の原因となる〕。
2. 可燃性麻酔剤、可燃性ガス、可燃性液体や物質（消毒液等の気化ガス、乾燥したガーゼ）などが存在する所及び酸素や亜酸化窒素などの可燃性ガス濃度が高くなっている所で使用しないこと〔引火・爆発による火災の発生や、患者及び術者に重大な損傷を与える可能性がある〕。
3. 本品はバイポーラ端子専用のアダプターであり、モノポーラ端子に接続しないこと〔予期せぬ出力電力が発生し、重篤な有害事象を引き起こす可能性がある〕。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

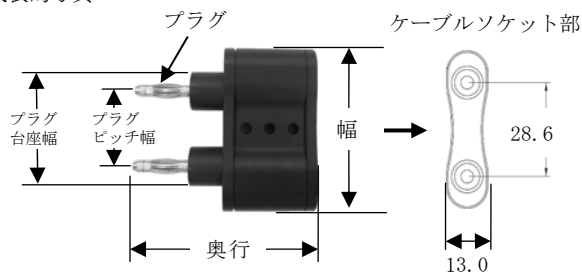

単位：mm

品番	プラグ ピッチ幅	プラグ 台座幅	奥行	幅	ケーブルソケット部	
					ピッチ幅	高さ
BBA-220	22.0	33.5	52.7	48.0	28.6	13.0
BBA-250	25.0	36.5				
BBA-286	28.6	40.1				
BBA-320	32.0	43.5				
BBA-360	36.0	47.5	59.7	51.0	28.6	13.0
BBA-380	38.0	49.5				

2. 原理

プラグピッチ幅をケーブルソケット部のピッチ幅に変換し、高周波電流を伝達する。

**【使用目的又は効果】

1. 使用目的

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者を接続するために用いられるアダプターをいう。一次電源に対する延長の用途を除く。

2. 使用目的に関連する使用上の注意

本品のプラグピッチ幅が電気手術器のソケットのピッチ幅と同一で、確実に接続できる電気手術器と併用して使用する。

**【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 本品のプラグピッチ幅が、併用する電気手術器のソケットピッチ幅と一致していることを確認する。
- 2) 電気手術器の主電源が入っていないことを確認し、本品を電気手術器のソケットへ奥まで差し込んで装着する。
- 3) バイポーラケーブルをケーブルソケット部のピッチ幅に注意して正しく接続する。
- 4) 電気手術器の電源を入れ、通電を確認する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品を着脱する際には、電気手術器の主電源が投入されていないことを確認すること。
- 2) 本品と電気手術器及びバイポーラケーブルの接続は正確でかつ完全であることを確認すること。

3. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、「BONIMED バイポーラケーブル (0189) 届出番号：27B1X00024000239」、「BONIMED ディスポバイポーラケーブル (0189) 届出番号：27B1X00024000241」又は「BONIMED バイポーラケーブル (0128) 届出番号：27B1X00024000242」等と併用して使用できる。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品の最大許容高周波電圧は 1000Vp である。

2. その他の注意

- 1) 本品を液体に浸さないこと。
- 2) 過剰な力で差し込み・引き抜きを行わないこと〔横方向の力を加えると破損するおそれがある〕。
- 3) 通常設定を超えて出力を増加させるように指示された場合、出力設定を上げる前に本品を含むすべてのケーブルと接続部分及び電極に異常がないことを確認すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒

- 1) めるま湯で湿らせた柔らかい布で清拭した後、腐蝕防止のために直ちに乾燥させる。
- 2) 消毒する場合は、少量の消毒用アルコールで湿らせた柔らかい布で清拭し、乾燥させる。

2. 点検

使用前に汚れ・破損等を点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：株式会社リングス