

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

リフトアシストビーチチェア

【禁忌・禁止】

当社指定の構成品以外の組合せで使用しないこと
[相互作用の項参照]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

リフトアシストビーチチェア及びリフトアシストビーチチェア用クランプ(非医療機器、以下「クランプ」)で構成される。

代表的写真



重量：約 13kg

適用患者体重：220kg 以下

設置できる手術台幅（レールを含む）：510～648mm

傾斜角度：0～85°

2. 原材料

パッド：ポリウレタンコーティング

3. 原理

本品には可動部があり、本品を手術台に取り付けて患者を固定・保持することで、患者を任意の位置に調整でき、肩の手術に最適なポジショニングを可能にする。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 使用前に、必要に応じて消毒剤で清拭する。
- 2) 本品の取付けができるよう手術台をセットする。
- 3) ショルダーパネルを取り外す。
- 4) クランプを手術台のサイドレールに設置する。
- 5) 本品をクランプに確実にはめ込み、固定する。
- 6) ショルダーパネル及び挿管プレートを取り付ける。
- 7) 本品を手術台の水平位置まで倒す。
- 8) 患者を乗せ、頭部及び臀部の位置を確認する。
- 9) 患者の頭頸部に注意しながら本体を起こし、適切な体位で固定する。
- 10) 患側のショルダーパネルを取り外す。

11) 抑制帯で患者を固定する。

12) 健側の腕を固定する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品を固定する手術台のサイドレールのレール幅及び厚みに適切なクランプを選択すること。
- 2) 抑制帯で患者を固定したまま本品の角度調節を行わないこと[患者に重大な損傷をもたらすおそれがある]。
- 3) 患者の身体に負荷をかけるような動作をしないこと。

3. 組み合わせて使用する医療機器

- 1) 本品は「販売名：ユニバーサルヘッドポジショナー 届出番号：27B1X00024000280」と併用して使用する。
- 2) 患側の腕の固定には「販売名：アームポジショナー 届出番号：27B1X00024000285」「販売名：アームポジショナー用ディスポパッド 届出番号：27B1X00024000286」を組み合わせて使用できる。
- 3) 健側の腕の固定には「販売名：ポジショニングエイド 届出番号：27BX00024000170」の構成品：マルチタスクアームボードが使用できる。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 適用患者体重を超えた使用をしないこと。
- 2) 使用する手術台の適用体重を超えないこと。
- 3) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように装着すること。
- 4) 本品のサイドレールへの固定及び取付けは確実に行うこと。

2. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定の構成品以外の他社製品	機器に重要な損傷を与え、患者又は使用者に重篤な障害あるいは死亡をもたらす危険性がある。	本品との接続に関する安全性が確認されていない。

**【保管方法及び有効期間等】

耐用期間[自己認証（当社データ）による]

本体：5 年

パッド：3 年

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒する。
- 2) 各構成品は噴霧液で消毒、清拭しないこと[サビの原因になるため]。

取扱説明書を必ずご参照ください

- 3) 各構成品は浸漬しないこと。
- 4) パッドはアルコール系消毒剤で清拭しないこと。
- 5) 使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。
- 6) 点検後異常があった場合は、誤って使用されないように「使用禁止」等の表示をしてご購入店又は弊社へ連絡する。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL 0725-53-5546



製造業者：ヒルロム社 メキシコ
Hill-Rom De Mexico S de RL de CV