

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

アームポジショナー


【禁忌・禁止】

アームポジショナー用ディスポパッドとの組合せ以外で使
用しないこと〔相互作用の項参照〕。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

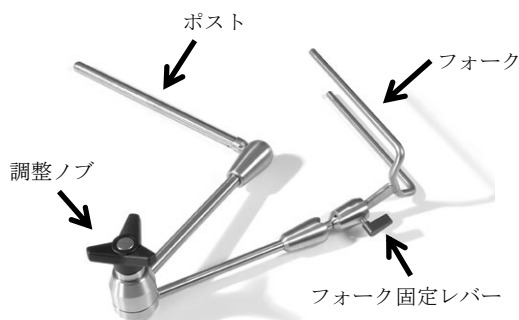

適用患者体重：220kg 以下

2. 原理

本品には可動部があり、本品を手術台に固定し患者の腕を固
定することで、患者の腕を任意の位置に調整でき、手術に最
適なポジショニングを可能にする。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 本品は未滅菌品の為、使用前に必ず滅菌を行うこと。高
圧蒸気滅菌（132℃、5 分）を推奨する。
- 2) 滅菌ドレーブを手術台及び患者の上に設置後、ドレーブ
越しに手術台サイドレールの位置を確認する。
- 3) オートクレーブ対応クランプを手術台サイドレールに取り
付ける。
- 4) ポストをオートクレーブ対応クランプに差し込み、高さ
及び角度を調整し、しっかりと固定する。
- 5) 調整ノブを締めて、アームポジショナーを任意の位置に
いったん固定する。
- 6) フォークをカチッと音がするまで差し込み、フォーク固
定レバーを締めてしっかりと固定する。
- 7) 最適位置に再調整し、しっかりと固定する。
- 8) 位置を変更する場合は、腕を保持した状態で調整ノブを
少し緩めて行う。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 患者の身体に負担をかけるような動作をしないこと。
- 2) 患者の腕の位置を変更する場合は、必ず腕を保持した状
態で行うこと。
- 3) 滅菌は、レバー、ノブを緩め、フォークを取り外した状
態で行うこと。

3. 組み合わせて使用する医療機器

本品は「販売名：アームポジショナー用ディスポパッド 届
出番号：27B1X00024000286」と併用して使用する。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 適用患者体重を超えた使用をしないこと。
- 2) 使用する手術台の適用体重を超えないこと。
- 3) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力がかからない
ように装着すること。

2. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の 名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定の アームポジ ショナー用 ディスポパ ッド以外の 他社製品	機器に重要な損傷を 与え、患者又は使用 者に重篤な障害ある いは死亡をもたらす 危険性がある。	本品との接続に関 する安全性が確認 されていない。

3. その他の注意

本品の手術台サイドレールへの取付けは確実に行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

製造年月より 5 年 [自己認証（当社データ）による]

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血
液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒する。
- 2) 浸漬洗浄しないこと。
- 3) 消毒用エタノール等で湿らせた柔かい布で清拭すること
[サビの原因になるため]。
- 4) 滅菌前及び使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検
する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：アレンメディカル社 アメリカ合衆国

Allen Medical Systems, Inc.