

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

N4 ポストシステム

再使用禁止

【禁忌・禁止】
ディスポパッドは再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真



総重量：約 10kg

寸法：約 W510×D650×H300mm

適用患者体重：220kg 以下

2. 原材料

ウイングセット(パッド部)：ポリウレタンコーティング
ディスポパッド：ポリウレタンフォーム

3. 原理

本品を手術台に固定し使用することにより、手術中の患者の体位を固定・保持するとともに術野を確保する。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 使用前に、必要に応じて消毒剤で清拭する。
- 手術台固定用ベルトを調節して、本品を手術台に取り付ける。その際、がたつきがないことを確認する。
- 患者に合わせてパッド部を適切な位置に調節して固定する。
- パッド部にディスポパッドを取り付け、患者を適切な体位、位置に固定する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 本品の手術台への固定及びウイングセットのクランプの固定は確実に行うこと。
- 患者の身体に負荷をかけるような操作をしないこと。

- ウイングセット側面の表示ラベルはパッド部の適切な位置を示しているため、表示に従って取り付けること。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 使用する手術台が、患者体重及び本品の重量に対して適切な耐荷重を有しているか確認する。
- 手術台の傾斜角度の変更時には患者の位置がずれ、又は患者が脱落することがないように、注意深く監視すること。
- 患者の体位を変更する、パッド部の位置を調整する、あるいはディスポパッドのずれを修正する場合は、2人以上で患者の体を支えて行うこと。
- 本品のフレーム(手術台接地面)を、手術台の可動部上に設置しないこと。
- 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力(体圧分散に注意しながら)がかからないように患者をポジショニングすること。
- 患者の体位固定後、本品に術者等の体重をかけたり押したりしないこと。
- 長時間の使用による患者の褥瘡や神経圧迫等に注意して使用すること。
- ディスポパッドは、ウイングセットのパッド部に正確に取り付けること。

2. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定の構成品以外の他社製品	機器に重要な損傷を与え、患者又は使用者に重篤な障害をもたらす危険性がある。	本品との接続に関する安全性が確認されていない。

*【保管方法及び有効期間等】

- 耐用期間〔自己認証(当社データによる)〕
パッド部(ウイングセット)：3年
上記以外：5年
- 有効期間〔自己認証(当社データによる)〕
ディスポパッド：3年

【保守・点検に係る事項】

- 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭する。
- ウイングセットのパッド部の清拭には、アルコール系消毒剤を使用しない。
- 本品は滅菌しないこと。
- 本品は浸漬しないこと。
- 使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。
- 点検後異常があった場合は、誤って使用されないように「使用禁止」等の表示をしてご購入店又は弊社へ連絡する。

取扱説明書を必ずご参照ください

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL 0725-53-5546



製造業者：ヒルロム社 メキシコ
Hill-Rom De Mexico S de RL de CV