

機械器具 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

Cueb ディスポ舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

再使用禁止、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、両端にカーブをつけた平坦な板状の器具である。

代表的写真



2. 原材料：カバ材

3. 原理

舌を圧定することで、口腔、咽頭の視野を確保する。

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる器具をいう。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 滅菌包装より無菌的に取り出す。
- 2) 片端を患者の口腔内に挿入し、操作する。

【使用上の注意】

その他の注意

使用前に、本品の汚れ・破損（欠け、割れ、ささくれ等）・変形等を点検すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所及び火気を避けて常温で保管する。

2. 有効期間

滅菌有効期間：製造年月より 3 年
[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL:0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp>

製造業者：大連グッドウッドメディカルケア社 中華人民共和国
DALIAN GOODWOOD MEDICAL CARE LTD.