

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

TIDI ステリ Z ペイシェントドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用しないこと。
2. 再滅菌しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL:0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

【形状・構造及び原理等】

1. 形状


本品は手術中のレントゲン撮影時に使用する滅菌されたドレープであり、中央に折目（Z 型）を有する。

製造業者：チャンシューユーシャンプロテクション

プロダクツ社 中華人民共和国

Changshu Yushan Protection Products Co., Ltd.

図面

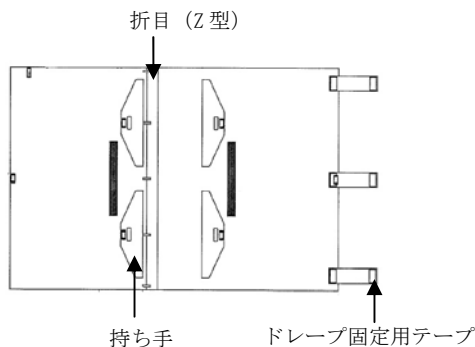

2. 原材料

本体：ポリエチレン

3. 原理

患者と手術台等を覆い、無菌状態を保持する。

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 滅菌包装より無菌的に取り出す。
- 2) 患者と手術台を覆い、ドレープ固定用テープで固定する。
- 3) 使用後は持ち手を両側から水平に引き、除去する。

※上記作業は二人以上で行うこと。

【使用上の注意】

高温を発する機器類に接しないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

滅菌有効期間：製造年月より 5 年

〔自己認証（当社データ）による〕