

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

トレンデレンブルグパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈併用医療機器〉

患者加温装置を患者と本品の間に、又は手術台マットレスと本品の間に入れて併用しないこと [相互作用の項参照]。

〈使用方法〉


再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、トレンデレンブルグパッドと、アシストシート（非医療機器）から構成される。

代表的写真

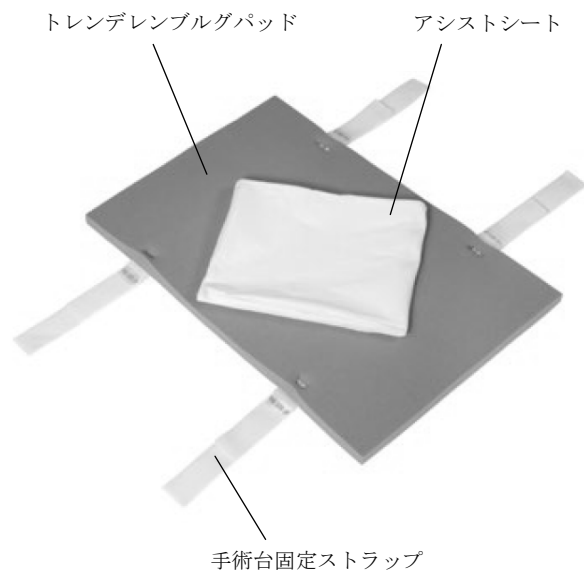

本体寸法：約 500mm（幅）×約 760mm（長さ）
 適用患者体重：220kg 以下
 最大傾斜角度：30°

2. 原材料

トレンデレンブルグパッド：ポリウレタン
 アシストシート：レーヨン、ポリエステル

3. 原理

本品を手術台に設置し使用することにより、手術中の患者の体位を固定・保持する。

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリである。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) トレンデレンブルグパッドを手術台の適当な位置に合わせて、手術台固定ストラップの「THIS SIDE UP」が上になる向きに設置する。
- 2) トレンデレンブルグパッドが手術台の中心に設置されるように、手術台固定ストラップを手術台のサイドレールの裏側から通して固定する。
- 3) トレンデレンブルグパッド上の、患者の肩甲骨と仙骨にかからない位置にアシストシートを広げる。
- 4) アシストシートを敷いたトレンデレンブルグパッドの上に患者を配置する。
- 5) アシストシートをゆっくりと持ち上げ、患者の位置を調整する。
- 6) 患者の両腕をアシストシートで巻き込み、固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) トレンデレンブルグ体位で使用する場合は、必要に応じてショルダーサポート（「販売名：ポジショニングエイド 届出番号：27B1X00024000170」）を併用すること。
- 2) 術中、時折体位を戻して皮膚の血行状態を確認すること。
- 3) 患者とトレンデレンブルグパッドの間にアシストシート以外のものを敷かないこと。
- 4) 本品を丸めたり、折り曲げたりしないこと。

2. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
患者加温装置	本品の材質が変形、変性する可能性がある。	本品との併用に関する安全性が確認されていない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 平らな場所に保管すること
- 2) 換気の良い、清潔な場所に保管すること。
- 3) 高温多湿、直射日光、紫外線の当たる場所に保管しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>製造業者：アレンメディカル社 アメリカ合衆国
Allen Medical Systems, Inc.