

機械器具 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

スロートスコープ舌圧子

再使用禁止（ブレード）

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞
再使用禁止（ブレード）

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
ブレード（舌圧子）は、ハンドル（非医療機器）と組み合わせて使用する。



2. 原材料
ブレード：ポリスチレン
3. 電氣的定格
定格電圧：DC 6V
（コイン形リチウム電池（CR2032）3.0V×2 個）
4. 原理
ブレードで舌を圧定することで、口腔、咽頭の視野を確保する。また、ライトにより観察を容易にする。

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺組織の検査を容易にするために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法
 - 1) ブレードをハンドルに挿入する。挿入時にライトは自動的に点灯する。
 - 2) 口腔内にブレードを入れて使用する。
 - 3) 使用后、ブレードはグリップを持ち、取り外す。ライトはブレードがハンドルから取り外されると自動的に消える。
2. 使用方法に関連する使用上の注意
 - 1) ブレードの表面が滑らかでない場合は使用しないこと（患者を傷つけるおそれがある）。
 - 2) 口腔内に傷がある患者には使用しないこと。
 - 3) 患者の意図しない噛む行為によって破損し、又はそれが原因で患者を傷つける可能性がある。
 - 4) ライトの過熱を避けるため、使用後はブレードを外すこと。
 - 5) 電池の交換はしないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所及び火気を避けて常温で保管する。
2. 耐用期間
ハンドル：使用回数 4000 回
[自己認証（当社データ）による]
3. *有効期間
5 年

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒
ハンドル：
使用後は、70%イソプロピルアルコール含有の消毒用ウェットティッシュでハンドルの表面全体を完全に拭き取って清掃する。
2. 点検
使用前に、汚れ・破損等を点検する

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社
TEL：0725-53-5546
<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：ゼアーjian フウフウ メディカル社
中華人民共和国
Zhejiang Huafu Medical Equipment Co., Ltd.