

機械器具 01 手術台及び治療台  
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

## プローンディスプレイマスク


### 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
**〈使用方法〉**  
再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状

代表的写真

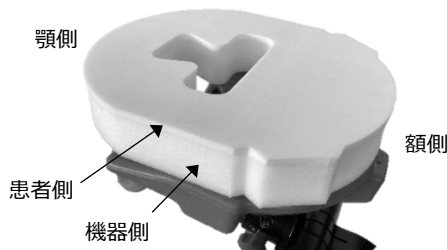

##### 2. 原材料

ポリウレタンフォーム

##### 3. 原理

腹臥位手術の際に併用機器にクッション性のある本品を設置することにより、本品に載せた顔面への圧が分散される。目、鼻、口の部分が開放されていることにより圧迫を避け、かつ使用中にチューブ等を通すことができる。

#### 【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

#### 【使用方法等】

##### 1. 使用方法

- 併用機器の中心に本品を設置し、腹臥位にした患者の頭部を載せる。又は患者の顔面に本品をあてがいながら、腹臥位にして併用機器の中心に載せる。
- 必要に応じて開放部からチューブ等を通す。
- 開放部を確認し、顔面に不適切な圧迫がないことを確認する。

##### 2. 使用方法に関連する使用上の注意

患者側（層が薄く、きめが細かい）と機器側、額側と額側がそれぞれ正しい向きで設置されているか確認すること。

#### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 使用前に、汚れ・破損等がないことを確認し、異常が認められた際は使用しないこと。
- 本品に頭部を載せた際及び体位を変更した際は、本品が併用機器の中心に位置していること、眼球や鼻口、神経等を圧迫していないこと、皮膚にしわが寄ったり引っ張られたりしていないことを確認すること。また、チューブのキンクや外れが発生していないことを確認すること【失明や褥瘡、換気不良等が生じるおそれがある】。

- 使用中は定期的に顔面への圧迫、皮膚の状態及びチューブのキンクや外れが発生していないことを確認すること。必要に応じて顔面の位置の調整や除圧等を行うこと【長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡が生じるおそれがある】。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

高温・多湿及び水濡れを避け、直射日光の当たらない清潔な場所で保管する。

##### 2. 有効期間

5年【自己認証（当社データによる）】

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器株式会社**  
TEL 0725-53-5546



製造業者：キーラ社 アメリカ合衆国  
Kyra Medical, Inc.