

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

プローンディスプレイカバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
代表的写真



2. 原材料

患者側：ポリウレタンフォーム
併用機器側：不織布

3. 原理

併用機器に被せて使用することにより、患者皮膚へのせん断力等の負荷を軽減することができる。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

1. 使用方法
- 1) 不織布面を併用機器にあてがう。
 - 2) 外輪部分を裏返してしわができないように機器に被せる。
2. 使用方法に関連する使用上の注意
- 不織布面が併用機器側に、ポリウレタンフォーム面が患者側になるように設置すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 使用前に、汚れ・破損等がないことを確認し、異常が認められた際は使用しないこと。
- 2) 本品に患者を載せた際及び体位を変更した際は、本品にしわがないこと、皮膚にしわが寄ったり引っ張られたりしていないこと、縫製部が患者にあたっていないことを確認すること [褥瘡が生じるおそれがある]。
- 3) 使用中は定期的になずれが生じていないことを確認すること。必要に応じて患者の位置の調整を行うこと [長時間の体位保持は褥瘡が生じるおそれがある]。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
- 高温・多湿及び水濡れを避け、直射日光の当たらない清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間

5年 [自己認証 (当社データによる)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器株式会社**
TEL 0725-53-5546



製造業者：キーラ社 アメリカ合衆国
Kyra Medical, Inc.