

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

プローンディスプレイカバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
再使用禁止

3) 使用中は定期的にずれが生じていないことを確認し、必要に応じて患者の位置を調整すること〔神経の圧迫や皮膚損傷が生じるおそれがある〕。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真



2. 原材料

患者側：ポリウレタンフォーム

3. 原理

併用機器に被せて使用することにより、患者皮膚へのせん断力等の負荷を軽減することができる。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

**【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 機器側（不織布面）を併用機器にあてがう。
- 2) 外輪部を裏返してしわができないように併用機器に被せる。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

機器側に不織布面が、患者側にポリウレタンフォーム面がくるように設置すること。

3. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、「販売名：KYRA Post スパインフレーム、届出番号：27B1X00024000477」、「販売名：KYRA Connect スパインシステム、届出番号：27B1X00024000478」と併用できる。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 使用前に、汚れ・破損等がないことを確認し、異常が認められた際は使用しないこと。
- 2) 本品に患者を載せた際及び体位を変更した際は、本品にしわがないこと、皮膚にしわが寄ったり引っ張られたりしていないこと及び縫製部が患者にあたっていないことを確認すること〔褥瘡が生じるおそれがある〕。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・多湿及び水濡れを避け、直射日光の当たらない清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間

5 年〔自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器株式会社**
TEL 0725-53-5546



製造業者：キーラ社 アメリカ合衆国
Kyra Medical, Inc.