


機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

KYRA セーフティストラップ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真

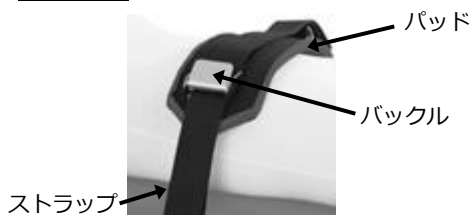

2. 仕様

適用患者体重：227kg 以下

3. 原材料

パッド：ポリウレタン

ストラップ：ニトリルゴム

4. 原理

手術等の際に、本品を患者の胴体等に巻き付けることで体位を固定できる。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 使用前に、必要に応じて消毒剤で清拭する。
- 2) 患者の胴体等にパッドを当て、ストラップを手術台と手術台サイドレールの間に通す。
- 3) バックルを持ち上げて手術台と手術台サイドレール間に通したストラップをバックルに通し、バックルを元に位置に戻して固定する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 患者の身体に負荷をかけるような動作をしないこと。
- 2) ストラップを過度に引っ張り、患者を圧迫しないようにすること。
- 3) 使用後は【保守・点検に係る事項】に従い清掃を行うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 適用患者体重及び手術台の耐荷重を遵守すること
[機器の破損や患者の脱落を起こすおそれがある]。
- 2) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が加わらないように装着すること。
- 3) 手術台への固定は確実に行うこと。
- 4) 手や指を挟まないよう注意すること。
- 5) 皮膚障害、神経障害、血行障害等の発生に十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・多湿及び水濡れを避け、直射日光の当たらない清潔な場所で保管すること。

2. 耐用期間

2 年 [自己認証（当社データによる）]

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃方法

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒する。
- 2) ワイプ又はスプレーを用いて清拭消毒する。消毒剤の例は以下のとおり。
<ワイプによる清拭を行う場合>
 - ・次亜塩素酸ナトリウム(2%以下)
 - ・塩化ベンザルコニウム(0.6%以下)及び塩化ジデシルジメチルアンモニウム(0.6%以下)。ポリヘキサメチレンピグアニド(0.6%以下)を含む場合もある。
 - ・イソプロピルアルコール(92%)<スプレーを用いて清拭を行う場合>
 - ・次亜塩素酸ナトリウム(2%以下)
 - ・塩化ベンザルコニウム(0.2%以下)及び塩化ジデシルジメチルアンモニウム(0.2%以下)。ポリヘキサメチレンピグアニド(0.6%以下)を含む場合もある。
 - ・過酸化水素(2%以下)
- 3) スプレータイプの消毒剤を用いる場合は、清潔な布に吹きかけて清拭すること [直接吹きかけると錆の原因になる]。
- 4) 各構成品は浸漬及び滅菌しないこと。
- 5) 漂白剤や研磨剤は使用しないこと。
- 6) 消毒後は乾いた清潔な布で清拭する。

2. 点検

使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器 株式会社
TEL 0725-53-5546製造業者：キーラ社 アメリカ合衆国
Kyra Medical, Inc.