

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

トレンデレンブルグ ディスポカバー


再使用禁止

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
再使用禁止**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

本品は、併用する陰圧式体位固定具に被せて用いるカバーである。

代表的写真（手術台側）

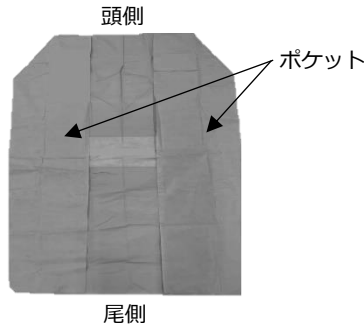

2. 原材料

ポリプロピレン、ポリエチレン

3. 原理

併用する陰圧式体位固定具に被せて使用することにより、術中の体液又はその他の汚染物質から陰圧式体位固定具を保護するとともに、患者皮膚へのせん断力等の負担を軽減することができる。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 併用する陰圧式体位固定具を手術台に取り付ける。
- 本品の頭側と尾側を陰圧式体位固定具に合わせ、ポケットが手術台側になるように、本品を片側ずつ取り付ける。
- 本品にしわやずれが生じないように調整する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

頭側と尾側、手術台側（ポケットがある面）と患者側（ポケットがない面）がそれぞれ正しい向きで使用されているか確認すること。

3. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、「販売名：ハグフォーム、届出番号：27B1X00024000452」と併用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 使用前に、汚れ・破損等がないことを確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。
- 本品に患者を載せた際及び体位を変更した際は、本

品にしわがないこと、皮膚にしわが寄ったり引っ張られたりしていないことを確認すること。

- 使用中は定期的にずれが生じていないことを確認すること。必要に応じて患者の位置の調整を行うこと。

2. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定の手術台アクセサリ以外の製品	患者に重篤な障害をもたらす危険性がある	本品との併用に関する安全性が確認されていない

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・多湿及び水濡れを避け、直射日光の当たらない清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間

3 年〔自己認証（当社データによる）〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器 株式会社
TEL 0725-53-5546



製造業者：キーラ社 アメリカ合衆国
Kyra Medical, Inc.