

機械器具 36 医療用ピンセット  
一般医療機器 ピンセット 35079001**BONIMED ピンセット****【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状

代表的写真



## 2. 原材料

ステンレス鋼

## 3. 原理

2枚の先端部を閉じることによって物体を保持する。

**【使用目的又は効果】**

保持する物体を閉じて挟む手術器具をいう。ハンドルは永久的に結合している。

**【使用方法等】**

## 1. 使用方法

- 使用前に、必ず洗浄・滅菌を行う。医療機関でバリデーションされた滅菌条件で滅菌すること。〔【保守・点検に係る事項】参照〕
- 親指と人差し指等を用いて握ると二つの保持面は閉じる。開くときには握る力を弱める〔潜在的なバネの反発力を利用する〕。

## 2. 使用方法等に関連する使用上の注意

本品を初めて使用する際は、器具を保護する保守油が塗布されているため、適切な油除去を行ってから滅菌処理を行うこと〔油が付着したまま高圧蒸気滅菌を行うと、器具が変色するおそれがある〕。

**【使用上の注意】**

重要な基本的注意

- 電気メスを用いた接触凝固は行わないこと〔術者が感電・熱傷の危険又は器具表面を損傷する可能性がある〕。
- 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄・滅菌を実施すること。〔【保守・点検に係る事項】参照〕
- 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

〔【保守・点検に係る事項】に記載された点検等において本品に異常が認められたとき、又は疑われるときは使用しないこと。〕

**【保守・点検に係る事項】**

## 1. 清掃方法

- 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄・消毒し、必要に応じて滅菌する。
- 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱い方法を守る。

- 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面が損傷するため使用を避ける。
- 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 洗浄、消毒、滅菌後は、腐食防止のために直ちに乾燥させる。
- 〔「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021」に記載されている高圧蒸気滅菌条件は以下のとおり。〕

滅菌温度	保持時間
121℃	15分
126℃	10分
134℃	3分

- 〔「プリオン病感染予防ガイドライン 2020」に記載されている洗浄・滅菌条件は以下のとおり。〕  
洗浄においては、アルカリ洗浄剤を用いて 90-93℃の高温で行う。ウォッシュャーディスインフェクターの使用が望ましい。工程を 2 回繰り返すことも推奨される。  
滅菌においては、134℃/8-10 分の真空脱気プレバキューム高圧蒸気滅菌を行う。滅菌時間は 18 分に延長することも推奨される。

## 2. 点検

滅菌前、使用前に汚れ・破損・変形等を点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者：**村中医療器株式会社**

TEL：0725-53-5546



製造業者：アイエイエイ社 パキスタン

IAA SURGICAL INSTRUMENTS COMPANY