

機械器具 50 開創又は開孔用器具  
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009

## HEINE visionPRO ビデオ喉頭鏡用ディスプレイブルブレード


### 再使用禁止

【禁忌・禁止】  
〈使用方法〉  
再使用禁止

#### \*【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状・構造

代表的写真

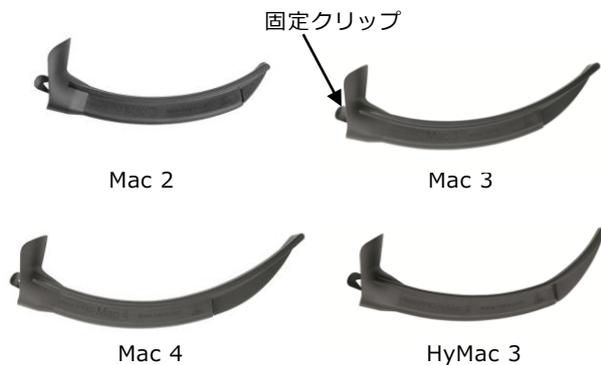

	有効長	挿入部最大径
Mac 2	101mm	29.4mm
Mac 3	117mm	33.0mm
Mac 4	132mm	34.4mm
HyMac 3	115mm	32.8mm

##### 2. 原材料

アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体、  
ポリカーボネート

##### 3. 原理

ビデオ喉頭鏡に装着し、口腔内に挿入することで喉頭を展  
開させる。

#### 【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管（人の気道）  
への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去  
したりするために用いる器具をいう。

#### 【使用方法等】

##### 1. 使用方法

- 1) 本品を併用するビデオ喉頭鏡の固定フックに固定クリッ  
プがしっかりとハマるところまで挿入し装着する。
- 2) ビデオ喉頭鏡のハンドルを握り、患者の口腔からブレード  
を挿入し、必要な観察又は処置等を行う。
- 3) 使用後は固定クリップを押し上げながらビデオ喉頭鏡か  
らブレードを取り外し廃棄する。

##### 2. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、「販売名：HEINE visionPRO ビデオ喉頭鏡、認  
証番号：306ACBZX00014000」と併用して使用する。

併用する機器の取扱説明書を必ずご参照ください

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

- 1) 患者に適したサイズを選択すること。
- 2) 使用前に、外観上の損傷や本品の表面に鋭いバリがない  
ことを確認すること。
- 3) ブレードの固定クリップがカメラアームの固定フックに  
しっかりとハマらない場合は、そのブレードを使用しな  
いこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管する  
こと。

##### 2. 有効期間

3年 [自己認証（当社データ）による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器株式会社**  
TEL 0725-53-5546



製造業者：ハイネ オプトテック社 ドイツ  
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG