


機械器具 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000**BONIMED 舌圧子****【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

代表的写真

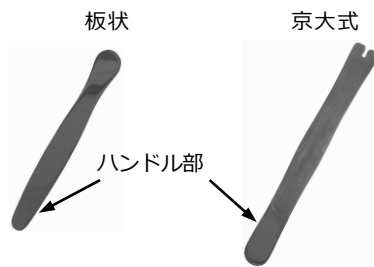

2. 原材料

ステンレス鋼

3. 原理

舌圧子で舌を圧定することで、口腔、咽頭の視野を確保する。

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具をいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 使用前に必ず洗浄・消毒を行う。
- 必要に応じて滅菌を行う。医療機関でバリデーションされた滅菌条件で滅菌すること。〔【保守・点検に係る事項】参照〕
- 本品のハンドル部を使用者が把持し、反対側を患者口腔内に挿入する。
- 本品で患者の舌を検査の妨げにならない位置に移動させる。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

本品を曲げて使用しないこと〔本品の破損により患者が負傷するおそれがある〕。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 電気メスを用いた接触凝固は行わないこと〔術者が感電・熱傷の危険性がある。また、本品表面を損傷するおそれがある〕。
- 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 清潔で乾燥した場所で保管する。
- 〔【保守・点検に係る事項】等に記載された点検等において本品に異常が認められたとき又は疑われるときは使用しないこと。〕

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃方法

- 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
- 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱い方法を守る。
- 超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
- 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面が損傷するため使用を避ける。
- 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥させる。
- 「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021」に記載されている高圧蒸気滅菌条件は以下のとおり。

滅菌温度	保持時間
121℃	15 分
126℃	10 分
134℃	3 分

- 「プリオン病感染予防ガイドライン 2020」に記載されている洗浄・滅菌条件は以下のとおり。

洗浄においては、アルカリ洗浄剤を用いて 90-93℃ の高温で行う。ウォッシャー・ディスインフェクターの使用が望ましい。工程を 2 回繰り返すことも推奨される。

滅菌においては、134℃/8-10 分の真空脱気プレバキューム高圧蒸気滅菌を行う。滅菌時間は 18 分に延長することも推奨される。

2. 点検

滅菌前、使用前に汚れ・破損・変形等を点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】製造販売業者：**村中医療器 株式会社**
TEL 0725-53-5546製造業者：アイエイエイ社 パキスタン
IAA SURGICAL INSTRUMENTS COMPANY