

機械器具 01 手術台及び治療台  
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

## KYRA トラクショントラップ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### 〈使用方法〉


再使用禁止、再滅菌禁止。

#### 【形状・構造及び原理等】


##### 1. 形状

###### 代表的写真

##### 〈フィンガートラップ〉

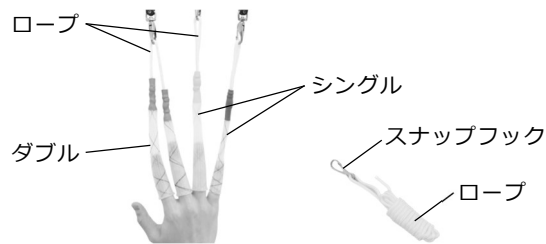

##### 〈アームトラップ〉

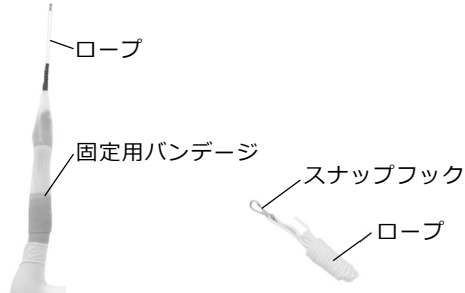

##### 2. 原材料

ポリエチレンテレフタレート

##### 3. 原理

手術等の際に、本品を滑車や安定した台等に取り付けて使用することで、患者の肩・腕・手指又はその関節等を張力により保持できる。

#### 【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

#### 【使用方法等】

##### 1. 使用方法

###### 〈フィンガートラップ〉

- 1) 患者の指にフィンガートラップを装着する。
- 2) フィンガートラップが指の全長をカバーしていることを確認する。
- 3) フィンガートラップのロープを軽く引っ張り、フィンガートラップから指が抜けられないことを確認する。
- 4) ロープを滑車や安定した台等に取り付ける。
- 5) スナップフックを使用する場合は、スナップフックをフィンガートラップのロープに取り付け、スナップフックのロープを滑車や安定した台等に取り付ける。

##### 〈アームトラップ〉

- 1) アームトラップに患者の腕を入れ、必ずアームトラップの上から固定用バンデージを手首及び前腕に巻いて固定する。
- 2) アームトラップのロープを軽く引っ張り、アームトラップから腕が抜けられないことを確認する。
- 3) ロープを滑車や安定した台等に取り付ける。
- 4) スナップフックを使用する場合は、スナップフックをアームトラップのロープに取り付け、スナップフックのロープを滑車や安定した台等に取り付ける。

##### 2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) アームトラップの上に巻く固定用バンデージは、強く巻きすぎないようにすること [血流を阻害するおそれがある]。
- 2) 固定用バンデージを手首及び前腕に巻きつける際は、巻き終わりの端から約 15cm の余裕を残し、この部分を伸ばしてしっかり固定すること。
- 3) 本品を取り付ける滑車や台等が安定していることを確認すること。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- 1) フィンガートラップは患者に適したサイズ及び種類を選択すること。
- 2) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように装着すること。
- 3) 使用中は、定期的に血流が適切に確保されていることを確認すること [虚血状態になるおそれがある]。
- 4) 本品を取り付ける際は手指を損傷しないように注意すること。

##### 2. 不具合・有害事象

本品の使用が原因で、以下の有害事象が発現する可能性がある。

###### ・その他の有害事象

脱臼、軟部組織の損傷、クラッシュ症候群、一時的な末梢神経障害

#### \*【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所で保管すること。

##### 2. 滅菌有効期限

製品ラベルに表示 [自己認証 (当社データによる)]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**村中医療器 株式会社**  
TEL:0725-53-5546



製造業者：キーラ社 アメリカ合衆国  
Kyra Medical, Inc.