

機械器具34 医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル
JMDN コード 12235000

ムトウトリミングナイフハンドル (130用・260用)

【警告・注意】

- ・この専用替刃は非常に鋭利ですので、取り扱いには充分注意して下さい。


【禁忌・禁止】

- ・生体には絶対に使用しないで下さい。
- ・ハンドルは古くなるとネジ等は錆びついて動かなくなります。危険ですので新品と交換して下さい。
- ・洗浄の句的でキシレン、シンナーは使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理】

・形状:

130用

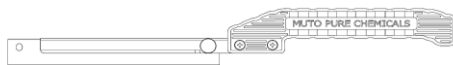

260用



- ・構造: ネジ固定式
- ・組成: 背金部／ステンレス
ハンドル部／ナイロン樹脂


【使用目的、効能又は効果】

- ・組織の切断・切離が可能な替刃を取り付けられるように設計された器具。

【品目仕様】

- ・病理標本の切り出しに用いる刃を装着でき、目的とした切片部分を容易に切り出せます。
- ・適当な洗剤を用いれば何度でも使用できます。

【替刃装着方法】

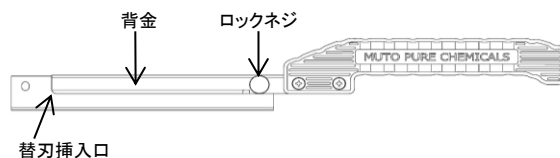

1. ハンドルのロックネジを緩めて下さい。
 2. 替刃を替刃挿入口から刃先を損傷しないようにゆっくり根元まで入れて下さい。
 3. 根元まで確実に入ったらロックネジを締めて固定して下さい。
- ※替刃をお取り換えになる場合はロックネジを緩めて替刃の先端部をゆっくり抜き取って下さい。
- ※替刃の取り扱い時には手を損傷しないように注意下さい。

【使用上の注意】

- ・替刃を挿入後、固定してあるかどうか確認して使用して下さい。
- ・本品は病理標本製作以外の目的では使用しないで下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・錆が生じないよう高温・多湿、直射日光は避け室温で保管して下さい。
- ・耐用年数は2年として下さい。
- ・使用後の洗浄は、病院の推奨する洗剤をご使用下さい。
- ・洗浄後は完全に乾燥させてから保管して下さい。
- ・製造日はロットナンバーにて表示。

Lot No 00 00 00

製造年西暦下2桁 製造月日

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者/製造業者: マイクログラス株式会社 北海道工場
〒073-0205 北海道空知郡上砂川町字上砂川1番地の6
TEL 0125-62-5959

発 売 元: 武藤化学株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目10番7号
TEL 03-3814-5511