

鼻用捲綿子

作成又は改訂年月日 2006年10月12日作成（第1版）

販売名 鼻用捲綿子

届出番号 11B3X10010000004

届出年月 平成18年10月

一般的名称

一般的名称 10172000 医科用捲綿子

製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等

氏名又は名称 村田医科器械製作所

村田秀夫

第三種医療機器製造販売業

住所等

さいたま市中央区下落合5-15-14

電話番号

048-852-7811

警告

記載なし

禁忌・禁止

記載なし

形状・構造及び原理等

本体：真鍮 クロームメッキ



使用目的、効能又は効果

鼻腔の消毒、薬の塗布等

操作方法又は使用方法等

六角部分を手に持ち、捲綿部に脱脂綿等を絡めて薬品や消毒液等を付けて鼻腔に挿入し塗布する。本品は未滅菌のため使用に際して必ず消毒すること。

[洗浄および消毒方法]

本品を熱湯の石鹼水で洗い、消毒用アルコールの中に10分以上浸して消毒する。再使用にあたっては同様に消毒する。

使用上の注意

1 重要な基本的注意

- 1 使用に先立ち本書を熟読し、その内容に従うこと。
- 2 本品は医家向け医療機器であり、使用目的以外に使用しないこと。
- 3 製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 4 本品を曲げたりしないこと。破損の原因となります。
- 5 捲綿部の先端に脱脂綿等をしっかりとねじって付けること。弱いと取れる場合があります。

貯蔵・保管方法及び使用期間等

1 貯蔵・保管方法

高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、常温で清潔な場所に保管すること。

包装

1本で包装