

器械器具 2 4
手動式皮膚痛覚計 一般医療機器

吉村知覚針

作成又は改訂年月日 2023年4月14日改訂（第3版）

販売名 吉村知覚針
届出番号 11B3X10010000006
届出年月 平成19年3月

一般の名称
一般の名称 12950001 手動式皮膚痛覚計

製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等

氏名又は名称 村田医科器械製作所
村 田 秀 夫
第三種医療機器製造販売業

住所等 さいたま市中央区下落合5-15-14
電話番号 048-852-7811

警告


記載なし

禁忌・禁止

記載なし

形状・構造及び原理等

本体と針とネジ：真鍮 ニッケルメッキ
ブラシ ナイロン糸

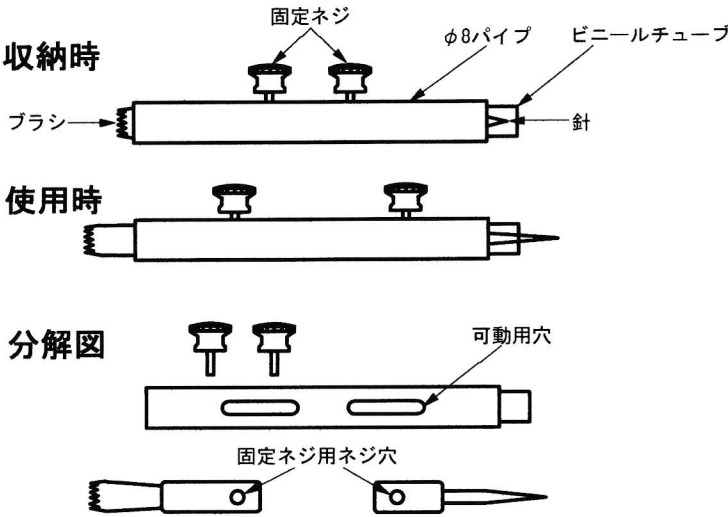

使用目的、効能又は効果

患者の知覚を測定する

操作方法又は使用方法等

手に持ち、針を使う時は針を出して固定ネジで止め、患部に刺さらない強さで当てて感覚を検査する。ブラシも同様にして患部に当てたり掃いたりして感覚を検査する

本品は未消毒のため使用に際して必ず消毒すること。

〔洗浄および消毒方法〕

ブラシの固定ネジを緩めて本体からブラシを取り出し、次に針の固定ネジを緩めて同じ側から針を取り出す。本体及び針とブラシを熱湯の石鹸水で洗い、消毒用アルコールの中に10分以上浸して消毒する。再使用にあたっては同様に消毒する。

使用上の注意

1 重要な基本的注意

- 1 使用に先立ち本書を熟読し、その内容に従うこと。
- 2 本品は医家向け医療機器であり、使用目的以外に使用しないこと。
- 3 製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 4 針を必要以上に強く押し当てて皮膚を傷つけないこと。

貯蔵・保管方法及び使用期間等

- 1 貯蔵・保管方法
高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、
常温で清潔な場所に保管すること。
- 2 耐用年数 6年

包装

- 1 本入／包装