

類別 : 理学診療用器具
一般的名称 : 温熱用パック
JMDNコード : 37240010
分類 : 一般医療機器

販売名 : パラファンゴバタグリアパック

品目番号:13B2X0022000001

※取扱説明書を必ずご参照ください。

【警告】

1. 本品は指定以外の加温装置では加温しないこと。
2. 本品は直接皮膚に当てて使用しないこと。
3. 本品を当てる部位の温度感覚が鈍っているときは使用しないこと。

【禁忌】

1. 本品は温熱用パックです。他の目的に使用しないこと。
2. 本品は次に該当する方は使用しないこと。
 - (1) ウイルス性皮膚炎(とびひなど)
 - (2) 痛みを伴う炎症
 - (3) 狭心症
 - (4) 頻脈
 - (5) 出血中の裂傷
 - (6) 高血圧
 - (7) 湿疹
 - (8) 知覚鈍麻
 - (9) 知覚麻痺の方

【形状・構造及び原理等】

1. 機器構造

(1) 本体

外装 : ポリウレタンフィルム

内容物 : 温泉鉱泥・泥・泥炭・精製パラフィン等

(2) 付属品

2. 形状(本体)

パラファンゴパック S

重量 500g±5g

寸法 295×135mm(内寸 255×115mm)


パラファンゴパック L

重量 1kg±10g

寸法 290×240mm(内寸 250×220mm)

常温: 固体

加温(溶解点 50℃±3℃): ゲル状

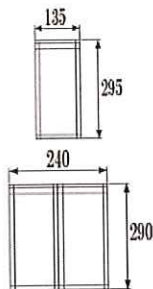

3. 原理

パラファンゴパックは温熱持続力が高いパラフィンと泥をポリウレタン袋に詰め、取り扱いやすくした製品です。パラファンゴパックはパラファンゴスチーマーで加温し、専用カバーに包み患部に於て使用します。

【使用目的・効能・効果】

- ・温熱効果
- ・鎮痛、鎮静、痛みの緩和

【操作方法又は使用方法】

1. パラファンゴスチーマーでパラファンゴパックを加温する。
2. パラファンゴパックを患部に於て、30分～120分程度温める。

【品目仕様】

品質

パラファンゴパックは温泉泥とパラフィンを混ぜ合わせ、特殊フィルムに封入したホットパックです。水を使わない為、簡単で衛生的です。

安全性

- パックの周囲は2重ウェルダースील加工を施し安全性・耐久性に優れています。
- 専用のパラファンゴパックカバーを使うことにより、フィルムの破けを予防します。

有効性

温度持続時間が長い(30分～120分間、40度以上を保つことが可能です)

【使用上の注意】

- ① パラファンゴパックを加熱する場合、パラファンゴスチーマーを使用し、80℃以上加熱しないでください。
- ② パラファンゴパックは必ずパラファンゴパックカバーに入れて使用してください。
- ③ パラファンゴパックを患部に於てる前にパックの温度を確認してください。
- ④ パラファンゴパックの温度調節はタオルなどで行ってください。
- ⑤ パックが破れて内容物が漏れている時は使用しないでください。
- ⑥ ご使用の際、皮膚に異常を感じた場合はすぐ使用をやめ、専門医に相談してください。

【取扱いの注意】

- ① パラファンゴパックを直接鍋に入れ火にかけないでください。
- ② 電子レンジ・オーブン・乾燥機等で温めないでください。
- ③ 内容物が漏れて皮膚に付いた場合は、すぐに冷やして固まった状態で除去してください。
- ④ パラファンゴパックは鋭利なものに触れると破れる恐れがあります。取扱いにご注意ください。
- ⑤ 本品は不燃物として廃棄してください。
- ⑥ 本品に体重が掛らないよう、体のにせて使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

- ① 直射日光の当たらないところで保管してください。
- ② 湿気の多いところには保管しないでください。
- ③ 極端に高温、低温のところに保管しないでください。

2. 有効期限

ウレタンフィルムが劣化し始めるまで

【保守・点検に係る事項】

パラファンゴパックは消耗品の為、ご使用前後にフィルムの破損や内容物の漏れ等がないか点検してください。パックの劣化や内容物の漏れがある場合は新品に買い替えてください。

(裏面に続く)

【包装】

ダンボールによる包装

1個単位で包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:株式会社 明健社

東京都三鷹市井口 2-10-48 TEL:0422-21-8080