

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス (70893000)
マルチパラフィンワックス

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、義歯の仮床、人工歯の配列、ロウ堤の作製等に用いる歯科用ワックスである。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社名城ラボ・マルチ化学研究所

形状 ・ 板状：147mm×75mm×1.4mm

☎ 052-915-1369

原理 ・ 本材を、火に炙って軟化させ、目的に合わせて使用する。

【使用目的又は効果】

義歯の仮床、人工歯の配列、ロウ堤作製等に用いる。

【使用方法等】

① 本材を、炙で加熱し、適度に軟化させたところで、ロール状にします。

② 棒状にした本材を馬蹄形にして、基礎床に圧接していきます。

③ 過不足部分は、盛り足したり、削ったりして咬合床を完成します。

④ 咬合床の調整、人工歯の配列、ロウ義歯の作製は通法に従って作業してください。

【使用上の注意】

① 本材は可燃性なので、使用の際は、火傷しないように注意する。

② 本材は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

① 本材は、高温の場所を避けて保管して下さい。

② 使用及び保管場所には、消化装置を備えてください。

③ 本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理して下さい。

歯科材料 0 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス (70893000)
マルチパラフィンワックス

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、義歯の仮床、人工歯の配列、ロウ堤
の作製等に用いる歯科用ワックスである。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社名城ラボ・マルチ化学研究所

形状 ・ 板状：147mm×75mm×1.4mm

☎ 0 5 2 - 9 1 5 - 1 3 6 9

原理 ・ 本材を、火に炙って軟化させ、目的に合わせて使用する。

【使用目的又は効果】

義歯の仮床、人工歯の配列、ロウ堤作製等に用いる。

【使用方法等】

① 本材を、炎で加熱し、適度に軟化させたところで、
ロール状にします。

② 棒状にした本材を馬蹄形にして、基礎床に圧接して
いきます。

③ 過不足部分は、盛り足したり、削ったりして咬合床
を完成します。

④ 咬合床の調整、人工歯の配列、ロウ義歯の作製は
通法に従って作業してください。

【使用上の注意】

① 本材は可燃性なので、使用の際は、火傷しないよう
に注意する。

② 本材は、添付文書に記載の用途以外には使用しない
こと。

【保管方法及び有効期間等】

① 本材は、高温の場所を避けて保管して下さい。

② 使用及び保管場所には、消化装置を備えてください。

③ 本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適
切に保管、管理して下さい。