

歯科材料 0 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)
メルトポリリッシャー

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、歯冠修復物や補綴物の研磨に用いられる。

形状 ・ 粉末

原理 ・ 本材を、適量の水に溶き、練り状にして、補綴物等に盛り付けて研磨する。

【使用目的又は効果】

本材は、歯冠修復物や補綴物の研磨に用いられる。

【使用方法等】

- ① レーズ用エンジン等に、研磨ガラスを装着します。
- ② 本材を、適量の水で溶き、練り状にして、補綴物等に盛り付けて研磨します。
- ③ 研磨作業後、水流いして本材を完全に除去してください。

【使用上の注意】

- ① 本材を扱う場合、粉塵による人体の影響を避けるため、局所集塵装置又は公的機関が認可した防塵マスク等を使用して下さい。
- ② 本材の使用により、発疹、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた場合は、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。
- ③ 本材は、歯科用研磨器材の用途以外は使用しないこと。
- ④ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑤ 本材が万一目に入った場合には、直ちに大量の水で洗浄後、眼科医の診断を受けて下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 本材は、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。
- ② 開封後は、密閉、保管して下さい。
- ③ 本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社名城ラボ・メルト化学研究所

☎ 0 5 2 - 9 1 5 - 1 3 6 9

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)
メルトポリッシュヤー

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、歯冠修復物や補綴物の研磨に用いられる。

形状 ・ 粉末

原理 ・ 本材を、適量の水に溶き、練り状にして、補綴物等に盛り付けて研磨する。

【使用目的又は効果】

本材は、歯冠修復物や補綴物の研磨に用いられる。

【使用方法等】

- ① レーズ用エンジン等に、研磨ブラシを装着します。
- ② 本材を、適量の水で溶き、練り状にして、補綴物等に盛り付けて研磨します。
- ③ 研磨作業後、水洗いして本材を完全に除去してください。

【使用上の注意】

- ① 本材を扱う場合、粉塵による人体の影響を避けるため、局所集塵装置又は公的機関が認可した防塵マスク等を使用して下さい。
- ② 本材の使用により、発疹、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた場合は、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。
- ③ 本材は、歯科用研磨器材の用途以外は使用しないこと。
- ④ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑤ 本材が万一目に入った場合には、直ちに大量の水で洗浄後、眼科医の診断を受けて下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 本材は、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。
- ② 開封後は、密閉、保管して下さい。
- ③ 本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社名城ラボ・メルト化学研究所

☎ 052-915-1369