

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 (70891000)
メルト AB シリコーン

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、歯科複模型を作製するために用いる
印象材料である。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社名城ラボ・メルト化学研究所

形状 ・ パテ状

☎ 052-915-1369

原理 ・ 本材の A 剤と B 剤を混合し、練和すると硬化
する。

【使用目的又は効果】

本材は、歯科複模型を作製するのに用いる印象材料。

【使用方法等】

①A 剤、B 剤を 1：1 の割合で均一になるまで、1 分程度
手早く練和します。

②空気を巻き込まないように注意し、室温で硬化後、
脱型してください。

【使用上の注意】

①A 剤と B 剤は、同一ロットの組み合わせで使用して
ください。

②他の製品と混用しないでください。

③開封後は、できるだけ速やかに使用してください。

④本材は、印象採得以外に使用しないでください。

⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

①本材は、直射日光や火気避け、室内の乾燥した場
所に保管してください。

②開封後は、密閉、保管して下さい。

③本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適
切に保管、管理して下さい。

④本材は、包装に記載の期限までに使用して下さい。

※通常の使用条件において、1 年間。

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 (70891000)
メルト AB シリコーン

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、歯科複模型を作製するために用いる
印象材料である。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社名城ラボ・メルト化学研究所

形状 ・ パテ状

☎ 052-915-1369

原理 ・ 本材の A 剤と B 剤を混合し、練和すると硬化
する。

【使用目的又は効果】

本材は、歯科複模型を作製するのに用いる印象材料。

【使用方法等】

①A 剤、B 剤を 1 : 1 の割合で均一になるまで、1 分程
度手早く練和します。

②空気を巻き込まないように注意し、室温で硬化後、
脱型してください。

【使用上の注意】

①A 剤と B 剤は、同一ロットの組み合わせで使用して
ください。

②他の製品と混用しないでください。

③開封後は、できるだけ速やかに使用してください。

④本材は、印象採得以外に使用しないでください。

⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

①本材は、直射日光や火気を選び、室内の乾燥した場
所に保管してください。

②開封後は、密閉、保管して下さい。

③本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適
切に保管、管理して下さい。

④本材は、包装に記載の期限までに使用して下さい。

※通常の使用条件において、1 年間。