

歯科材料 0 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用エム製研磨材 (70903000)
メルトラバーホーヤール

【形状・構造及び原理等】

概要 ・本材は、歯冠修復物や補綴物の研磨に用いる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者: 株式会社名城ラボ・メルト化学研究所

形状 ・円盤状: 直径 22mm、厚さ 3mm

品 0 5 2 - 9 1 5 - 1 3 6 9

原理 ・歯科用ハンドピース等に装着し、回転により
被研削物等を研削する。

【使用目的又は効果】

本材は、歯冠修復物や補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転
機器に装着し、回転させ、ソフトタッチで断続的に被
研削物に押し付けて、研磨します。

【使用上の注意】

- ①本材を扱う場合、粉塵による人体の影響を避けるた
め、局所集塵装置又は公的機関が認可した防塵マス
ク等を使用して下さい。
- ②過度の回転数を超えて、使用しないこと。
- ③損傷、変形のあるものは使用しないこと。
- ④本材は、歯科用研磨器材の用途以外は使用しない
こと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑥目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用して
ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ①水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外
圧及び汚染を受けないように保管してください。
- ②本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適
切に保管、管理して下さい。

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用エム製研磨材 (70903000)
メルトラバーホール

【形状・構造及び原理等】

概要 ・本材は、歯冠修復物や補綴物の研磨に用いる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社名城ラボ・メルト化学研究所

形状 ・円盤状：直径 22mm、厚さ 3mm

☎ 0 5 2 - 9 1 5 - 1 3 6 9

原理 ・歯科用ハンドピース等に装着し、回転により
被研削物等を研削する。

【使用目的又は効果】

本材は、歯冠修復物や補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転
機器に装着し、回転させ、ソフトタッチで断続的に被
研削物に押し付けて、研磨します。

【使用上の注意】

- ①本材を扱う場合、粉塵による人体の影響を避けるた
め、局所集塵装置又は公的機関が認可した防塵マス
ク等を使用して下さい。
- ②過度の回転数を超えて、使用しないこと。
- ③損傷、変形のあるものは使用しないこと。
- ④本材は、歯科用研磨器材の用途以外は使用しない
こと。

- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑥目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用して
ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ①水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外
圧及び汚染を受けないように保管してください。
- ②本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適
切に保管、管理して下さい。