

2017年 7月改訂（第2版新記載要領に基づく改定）
2006年 2月25日作製（第2版）

届出番号：23B3X00002000029

歯科材料06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材（70891000）
リプロシリコーン

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、歯科複模型を作製するために用いる
印象材料である。

形状 ・ パラ状

原理 ・ 本材のA剤とB剤を混合し、練和すると硬化
する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社名城ラボ・マルチ化学研究所
☎052-915-1369

発売元：株式会社キヤスデザインズ・オカモト
滋賀県高島市北卯452
☎0740-22-5011

【使用目的又は効果】

本材は、歯科複模型を作製するのに用いる印象材料。

【使用方法等】

- ①A剤、B剤を1：1の割合で均一になるまで、1分程度手早く練和します。
- ②空気を巻き込まないように注意し、室温で硬化後、脱型してください。

【使用上の注意】

- ①A剤とB剤は、同一ロットの組み合わせで使用してください。
- ②他の製品と混用しないでください。
- ③開封後は、できるだけ速やかに使用してください。
- ④本材は、印象採得以外に使用しないでください。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ①本材は、直射日光や火気を選び、室内の乾燥した場所に保管してください。
- ②開封後は、密閉、保管して下さい。
- ③本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理して下さい。
- ④本材は、包装に記載の期限までに使用して下さい。

※通常の使用条件において、1年間。