

2021 年 1 月 17 日作製(第 1 版)

医療用具許可番号:23B3X00002000041

改定 2022 年 7 月 26 日 (第 2 版)

歯科材料 0 6 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 (70891000)

コスモス S I M

【禁忌・禁止】

本材は、絶対に口腔内に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、歯科複模型を作製するために用いる印象材料である。

形状 ・ 主剤：粘性液体 硬化剤：ペースト状

原理 ・ 本材の主剤と硬化剤を混合し、練和すると硬化する。

【使用目的・効能又は効果】

本材は、歯科複模型を作製するのに用いる印象材料。

【品目仕様】

硬化条件	23℃
硬度 shoreA	29
混合比 (重量比)	主剤：硬化剤＝10：1
作業可能時間 (23℃)	105 秒
硬化時間 (標準)	23℃/180 秒

【操作方法又は使用方法等】

- ① 主剤、硬化剤を 10：1 の割合で均一になるまで、1 分程度手早く練和します。
- ② 空気を巻き込まないように注意し、室温で硬化後、脱型してください。

【使用上の注意】

- ① 主剤と硬化剤は、同一ロットの組み合わせで使用してください。
- ② 他の製品と混用しないでください。
- ③ 開封後は、できるだけ速やかに使用してください。
- ④ 本材は、印象採得以外に使用しないでください。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ① 本材は、直射日光や火気を避け、室内の乾燥した場所に保管してください。
 - ② 開封後は、密閉、保管して下さい。
 - ③ 本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように十分に保管、管理して下さい。
 - ④ 本材は、包装に記載の期限までに使用して下さい。
- ※通常の使用条件において、1 年間。

【包装】

色調：主剤：水色

硬化剤：白色

包装：主剤 1kg 缶、硬化剤 100g チューブ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者：株式会社名城ラボ・メルト化学研究所

愛知県名古屋市中北区志賀本通 2-13

☎ 052-915-1369

販売元：株式会社キヤスデインゾ・オカモト

☎ 0740-22-5011