

ハイスピードグラインダー

【警告】


1. ハイスピードグラインダー使用時は、必ず使用者は防護用めがねを装着すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 機器の使用の為に、注意事項を必ず守ること。

【禁忌・禁止】

1. 使用しない時は、モーターを空回しの状態で放置することなく、必ずスイッチを切ること。
2. 当品の周囲には、可燃性のものは置かないこと。
3. 歯科技工以外には使用しないこと
4. 機器の形態変更や、改造を行わないこと。
5. 機器を落下させたり、破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。必ず輸入元に戻し、再検査後の合格品を使用すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成

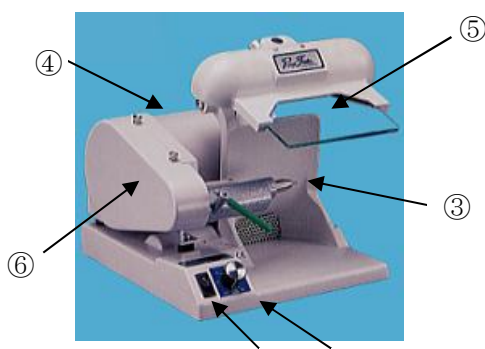

- ① ライトスイッチ
- ② スピードコントロールノブ*
- ③ スピンドル
- ④ モーター部
- ⑤ ライトシールド
- ⑥ ベルトガード

*スピードコントロール機能搭載型のみ

電氣的定格

定格電源電圧	AC100V
定格電源周波数	50/60Hz

【使用目的又は効果】

歯科補綴物、歯科用金属など、歯科技工上必要な研削、切削、トリミングなどをするとき使用する高速回転装置。

【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

- (1) 被切削物を準備する。
- (2) スピンドル部に歯科技工用バー、研磨用パフ、ブラシなどを装着する。
- (3) 使用者は、防護用めがねを装着する。
- (4) 本体の電源コードの接続を行う。
- (5) コントロールユニットのスイッチを入れる。
- (6) 被切削物を歯科技工用バー、パフ、ブラシなどで、切削、研磨作業を行う。

【使用上の注意】

1. 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。
2. 不明な点がある時は、必ず輸入元に問い合わせること。
3. 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時、機器の作動はすみやかに中止すること。
4. 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱をしないこと。
5. 使用後は、モーターを空回しの状態で放置することなく、必ずスイッチを切ること。
6. 完全使用後は、必ず電源コードをコンセントから抜くこと。
7. 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【保守、点検に係る事項】

機器使用前に、破損等がないことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL：052-799-4075

FAX：052-353-6610

製造業者：レイフォスターデンタルエキップメント社
RAY FOSTER DENTAL EQUIPMENT
アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください