

## ウルトラシンジスク

### 【禁忌・禁止】

1. 使用中は、過度の圧力を加えたり、過度の駆動回転を与えたりしないこと。
2. キズ、めくれ、その他の損傷が認められるものは使用しないこと。
3. 歯科用以外の用途には使用しないこと。

### 【使用上の注意】

1. 使用する回転器具（マイクロモーター、ハンドピース等）の添付文書や仕様説明書を熟読したあと、正しく回転器具に装着すること。
2. 使用する前に、当ジスクが緩み無く、正しく固定装着されているかを確認すること。
3. 使用する前に、目を保護するための防護用ゴーグル（防護メガネ）を必ず使用すること。

### 【形状・構造及び原理等】



#### 成分

シリコンカーバイド粒子をジスク状に固形化したもの。

直径	22.2mm
厚さ	0.22mm

### 【使用目的又は効果】

1. 使用目的・用途  
歯科技工用マイクロモーター、或いは歯科技工用エンジンを使ったハンドピースに装着し、回転させることにより歯科用補綴物の研削、切断を行うもの。
2. 使用する器械の種類
  - 歯科技工用マイクロモーター
  - 歯科技工用ハンドピース

### 【使用方法等】

1. 歯科技工用マイクロモーター或いは歯科技工用エンジンを使ったハンドピースにウルトラシンジスクを装着する
2. マイクロモーター及びハンドピースをONにし、回転させる。
3. 歯科用補綴物等にウルトラシンジスクを当て、研削／切断を行う。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 低温・低湿度の風通しの良い場所に保管すること。
2. 児童の手の届かない場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL： 052-799-4075

FAX： 052-353-6610

製造業者：キーストンインダストリーズ社

Keystone Industries

アメリカ合衆国