

ヒートレスホイール

【禁忌・禁止】

1. 使用中は、過度の圧力を加えたり、過度の駆動回転を与えたりしないこと。
2. キズ、めくれ、その他の損傷が認められるものは使用しないこと。
3. 歯科用以外の用途には使用しないこと。

【形状・構造等及び原理等】

形状



成分

シリコンカーバイド粒子をジスク状に固形化したもの。

【使用目的又は効果】

歯科技工用マイクロモーター、或いは歯科技工用エンジンのハンドピースに装着し、回転させることにより歯科用補綴物の研削、研磨を行うもの。

使用できる器械の種類

- 歯科技工用マイクロモーター
- 歯科技工用エンジン

色	グレー及びホワイト
直径	22.2mm / 19.1mm
厚さ	3.00mm

【使用方法等】

1. 歯科技工用マイクロモーター或いは歯科技工用エンジンのハンドピースにヒートレスホイールを装着する。
2. マイクロモーター及び技工用エンジンをONにし、回転させる。
3. 歯科用補綴物等にヒートレスホイールを当て、研削、研磨を行う。

【使用上の注意】

- 使用する前に、当ジスクが緩み無く、正しく固定装着されているかを確認すること。
- 使用する前に、目を保護するための防護用ゴーグル(防護メガネ)を必ず使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 低温、低湿度の風通しの良い場所に保管すること。
- 児童の手の届かない場所に保管すること。

【取扱い上の注意】

- 使用する回転器具(マイクロモーター、技工用エンジン等)の添付文書や仕様説明書を熟読したあと、正しく回転器具に装着すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社
TEL: 052-799-4075
FAX: 052-353-6610

製造業者: キーストンインダストリーズ社
Keystone Industries
アメリカ合衆国