

ドライトリマー

【警告】

1. 使用目的に応じて使用すること。
2. 機器の使用の為に、注意事項を必ず守ること。

【禁忌・禁止】

1. 歯科技工以外には使用しないこと。
2. 機器に破損、劣化、異常が認められた時は使用を中止すること。
3. 機器の形態変更や、改造を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成



- 2.

- ① グラインディングホイール
- ② 研磨台
- ③ 研磨台固定ノブ
- ④ モーター
- ⑤ トリマードア
- ⑥ 集塵装置接続口

3. 形状

寸法: H350×W350×D380mm

重量: 14kg

ホイール直径: 10 インチ

定格電源電圧 AC110 / 115V

定格電源周波数 50/60Hz

【使用目的又は効果】

石膏・埋没材・アクリルレジンなどでできた歯科模型を適切なサイズ・形状にトリミングする際に使う機械である。集塵装置に接続することで、石膏ダストを完全に吸い取るため、室内環境を清潔に保つことができる。

【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

- (1) 模型をできるだけ乾いた状態にする。
- (2) 集塵装置にホースを接続して、集塵装置の電源を入れる。
- (3) モーターのスイッチを ON にする。
- (4) 模型を回転しているホイールにあて、トリミング作業を実施する。

【使用上の注意】

1. 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。
2. ホイールに指を近づけないようにすること。
3. グラインディングホイールが鈍くなったと感じた場合は、過度な圧力を加えるようなことはせずに、ホイールの交換を行うこと。
4. 不明な点がある時は、必ず輸入元に問い合わせること。
5. 機器の落下、破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。必ず輸入元に戻し、再検査後の合格品を使用すること。
6. 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時は、機器の作動をすみやかに中止すること。
7. 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱をしないこと。
8. 使用時は、目の保護ができる安全メガネやゴーグルを着用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
3. 耐用年数: 6年

【保守、点検に係る事項】

1. 機器使用前に、破損等がないことを確認すること。
2. グラインディングホイールの交換などの作業を行う前には、必ず電源コードを抜いてから行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: レイフォスターデンタルエキップメント社
RAY FOSTER DENTAL EQUIPMENT
アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください