

## コンビマイクロモーター

### 【警告】

1. マイクロモーター使用時は、必ず使用者は防護用めがねを装着すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 機器の使用の為に、注意事項を必ず守ること。

### 【禁忌・禁止】

1. 使用しない時は、マイクロモーターハンドピースを空回しの状態で放置することなく、必ずスイッチを切ること。
2. 当品の周囲には、可燃性のものは置かないこと。
3. 歯科技工以外には使用しないこと
4. 機器の形態変更や、改造を行わないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成



- ① コントロールユニット
- ② FWD/REV 選択スイッチ
- ③ スピードコントロール
- ④ マイクロモーターコネクタ
- ⑤ フットペダルコネクタ
- ⑥ HAND/FOOT 選択スイッチ
- ⑦ 充電器コネクタ
- ⑧ マイクロモーターハンドピース
- ⑨ マイクロモーターハンドピース設置台
- ⑩ フットペダル

### 電氣的定格

- 定格電源電圧: AC100~240V  
定格電源周波数: 50/60Hz

### 【使用目的又は効果】

歯科補綴物、歯科用金属など、歯科技工上必要な研削、切削、トリミングなどをするとき使用する装置。

### 【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

- (1) コントロールユニットと AC アダプタを接続し、充電を行う。
- (2) 被切削物を準備する。
- (3) DC モーターハンドピースにバーを装着する。
- (4) 使用者は、防護用めがねを装着する。
- (5) ハンドピースをコントロールユニットへ接続する。
- (6) コントロールユニットのスピードコントロールを回し、モータのスイッチを入れる。
- (7) スピードコントロールを操作し、バーに必要な回転数の調節を行う。
- (8) 被切削物を DC モーターハンドピースで切削する。
- (9) 使用後は、ハンドピースを空回しの状態で放置することなく、スピードコントロールを OFF にすること。

### 【使用上の注意】

1. 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。
2. 不明な点がある時は、必ず輸入元に問い合わせること。
3. 機器を落下させたり、破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。必ず輸入元に戻し、再検査後の合格品を使用すること。
4. 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時、機器の作動はすみやかに中止すること。
5. 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱をしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社  
TEL: 052-799-4075  
FAX: 052-353-6610

製造業者: セーヤン社  
Saeyang Micro Tech Co., Ltd.  
韓国