


## メINAN レーズブラシ 豚毛

### 【禁忌・禁止】

本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

### 【形状・構造等及び原理等】

#### 1. 形状

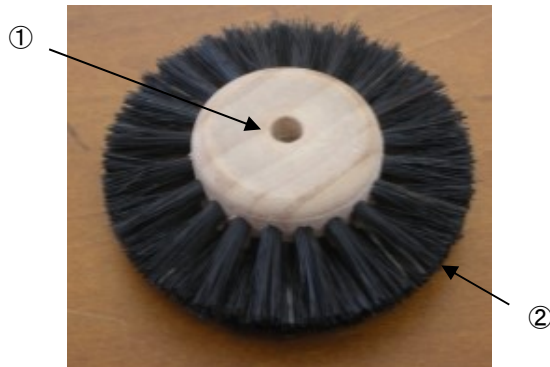

- ① 軸部: 木
- ② 研磨部: 豚毛

#### 2. 作動原理

モーター機構を持つ技工用レーズにレーズブラシが装着される。技工用レーズからの回転運動を受けることによって、レーズブラシの研磨部が回転し、対象物を研磨する。

### 【使用目的又は効果】

技工用レーズに装着して、対象物を研磨する時に使用する。

研磨部(ブラシ)の構成として、以下の3種類がある

- ・ 1列
- ・ 2列
- ・ 3列

### 【使用方法等】

- (1) 技工用レーズにレーズブラシを装着する
- (2) 技工用レーズの電源を入れ、レーズブラシを回転させて対象物を研磨する。

### 【使用上の注意】

- (1) 損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- (2) 使用前に予備回転を行い、揺れが無いことを確認すること。

- (3) 落下・誤飲に注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社  
TEL: 052-799-4075  
FAX: 052-353-6610

製造業者: ウーハン社  
Wuhan Jinguang medical technology Co., Ltd  
中国