

エコ450 マイクロモーター

【警告】


1. 使用目的に応じて使用すること。
2. 使用者は必ず防護用めがねを着用すること

【禁忌・禁止】

1. 使用しない時は、マイクロモーターハンドピースを空回しの状態で放置することなく、必ずスイッチを切ること。
2. 当品の周囲には、可燃性のものは置かないこと。
3. 歯科技工以外には使用しないこと
4. 機器の形態変更や、改造を行わないこと。
5. 機器を落下させたり、破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。必ず輸入元に戻し、再検査後の合格品を使用すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成

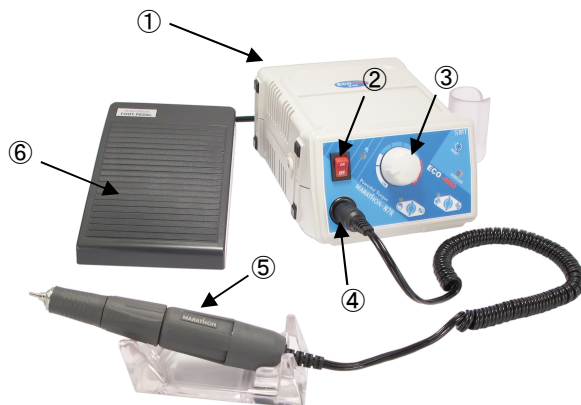

- ① コントロールユニット
- ② 電源スイッチ
- ③ スピード調節ノブ
- ④ モーター接続部
- ⑤ ハンドピース
- ⑥ フットペダル

【使用目的又は効果】

歯科技工室で歯科技工用ハンドピースに回転力を与えるためにフレキシブルドライブシステムとともに用いるモーターをいう。様々な速度制御装置と組み合わせた電気式又は空気式のものがある。

最大回転数: 45,000 rpm

【使用方法等】

- (1) 被切削物を準備する。
- (2) ハンドピースに歯科技工用バーを装着する。
- (3) 使用者は、防護用めがねを装着する。
- (4) 本体の電源コードの接続を行う。
- (5) コントロールユニットのスイッチを入れる。
- (6) 技工用バーに必要な回転数の調節を行う。
- (7) 被切削物をマイクロモーターハンドピースで切削する。
- (8) 使用後は、モーターを空回しの状態で放置することなく、必ずスイッチを切ること。
- (9) 完全使用後は、必ず電源コードをコンセントから抜くこと。

【使用上の注意】

1. 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。
2. 不明な点がある時は、必ず製造販売業者に問い合わせること。
3. 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時は、機器の作動はすみやかに中止すること。
4. 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱いをしないこと。
5. 使用後は、ハンドピースを空回しの状態で放置することなく、必ずスイッチを切ること。
6. 完全使用後は、必ず電源コードをコンセントから抜くこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染・破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・ 耐用年数: 5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社
TEL: 052-799-4075
FAX: 052-353-6610

製造業者: セーヤン社
Saeyang Co., Ltd.
韓国

取扱説明書を必ずご参照ください