

プロフィールブラシ

【禁忌・禁止】

- 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。
- 使用ハンドピースに正しく装着、固定しないときは使用しないこと。
- スクリュータイプにアタッチメント等を取付し、コントラタイプとして使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成と主原料



- ① 軸部: スチール
- ② 研磨部: ナイロン

【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具をいう。

【使用方法等】

ハンドピース(スクリュータイプ)に装着して、歯を研磨する時に使用する。

プロフィール専用の研磨剤と併用して使用する。

ブラシスクリュー

直径	約0.4cm
全長	1.7cm

ポイントブラシ・スクリュー

直径	約0.4cm	※円錐形
全長	2.0cm	

【使用上の注意】

1. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
2. 本品の使用は、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 使用前に予備回転を行い、揺れが無いことを確認すること。
4. 落下・誤飲に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: ペンリン社

Peng Lim Enterprise Co., Ltd.
台湾