

## キャドカムワックス

### 【禁忌・禁止】

- 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造



#### 2. 成分

パラフィンワックス、その他

### 【使用目的又は効果】

#### 1. 使用目的

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストリングワックス。

#### 2. 効果

キャドカム器械で人工歯を制作する時に使用し、スキャナーによるスキャン可能なワックス。

カラー: グリーン・ベージュ・グレー

質量: 70 g

### 【使用方法等】

使用目的に合わせ、適量を取り軟化させ、使用する。

### 【使用上の注意】

1. 本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など)に放置しないこと。
2. 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
3. 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
4. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: キーストンインダストリーズ社

KEYSTONE Industries

アメリカ合衆国