

## シャープイメージ パノラマX線フィルム

### 【警告】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。

### 【禁忌・禁止】

- フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
- 静電気が発生するような極度な低湿度下での使用は避けること。

### 【形状・構造及び原理等】



- 透明なフィルムベースに光線とX線に感受性を有する銀塩感光材料を塗布したもの。
- フィルム乳剤中のハロゲン化銀にX線や増感紙からの蛍光が照射されると、目に見えない像が形成される。この目に見えない像を現像することにより、目に見える黒い銀画像にすることができ、この黒い銀画像が診断画像となる。

### 【使用目的又は効果】

特に歯科X線装置で使用するためにサイズを定めて設計したスクリーン型X線フィルム。

### 【使用方法等】

1. フィルムを歯科用X線レントゲン装置にセットする。
2. 撮影を実施する。撮影に当たっては、レントゲン装置の取扱説明書等に従い正しく行うこと。
3. 現行処理を行う。

1枚サイズ：15×30mm

感光を防ぐため、遮光性カバーにて包装。  
一度封を開けたら暗室で使用を行う。

### 【使用上の注意】

1. 適切な安全光の下で開封すること。
2. 開封後はなるべく早めに使用すること。また、遮光のため、内袋に入れたまま保管すること。
3. 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
4. フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
5. 静電気が発生するような極度な低湿度下での使用は避けること。
6. 濡れた手による取り扱いは避けること。
7. 二重遮光は避けること。
8. 使用目的以外に使用しないこと。
9. 長時間、高温度下での取り扱いは避けること。特にスポットライトやOHPを使用する場合には注意すること。
10. フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となるので、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

フィルムは直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温・低湿の場所に保管すること。

推奨温度：10～24℃

推奨湿度：30～50℃

#### 2. 有効期間

有効期間（使用期限）は、商品のパッケージ上に明記されているので、それまでに使用すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL：052-799-4075

FAX：052-353-6610

製造業者：株式会社 タイヨーデンタル