

シェーラ エコツール ミリングバー

【禁忌・禁止】

- 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。
- 使用ハンドピースに正しく装着、固定しないときは使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



- ① 軸部：ステンレス製
- ② 切削先端部：ステンレス製

【使用目的又は効果】

スチール製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品に錆、傷等がないことを確認する。
2. 「SHERA eco-mill150」のミリングバー設置位置に設置する。
その時、取り付け機器のスイッチはOFFにしておく。
3. 装着後、しっかりと固定出来ている事を確認し取り付け機器のスイッチをONにする。
4. コンピュータプログラムにより設定された回転数にて、歯科用セラミック又は歯科用ワックスを形成する。

【使用上の注意】

1. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
2. 本品の使用は、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 落下・誤飲に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL：052-799-4075

FAX：052-353-6610

製造業者：シェーラ社

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG
ドイツ

タイプ	径
ジルコニア用バー	0.6 mm
ジルコニア用バー	1.0 mm
ジルコニア用バー	2.0 mm
複合材料用バー	0.6 mm
複合材料用バー	1.0 mm
複合材料用バー	2.0 mm
ワックス・アクリル樹脂用バー	0.6 mm
ワックス・アクリル樹脂用バー	1.0 mm
ワックス・アクリル樹脂用バー	2.0 mm