

エアーターボ 300W

【警告】

1. 本品使用時は、必ず使用者は防護用めがねを装着すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 機器の使用の為に、注意事項を必ず守ること。

【禁忌・禁止】

1. 使用しない時は、ハンドピースを空回しの状態で放置することなく、必ずスイッチを切ること。
2. 当品の周囲には、可燃性ものは置かないこと。
3. 歯科技工以外には使用しないこと
4. 機器の形態変更や、改造を行わないこと。
5. 機器を落下させたり、破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。必ず輸入元に戻し、再検査後の合格品を使用すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成



- ① 気圧計
- ② 水調整ノブ
- ③ エアー調整ノブ
- ④ レギュレーター
- ⑤ ウォータータンク
- ⑥ フットスイッチ
- ⑦ HP（エアータービン）

2. 電気的定格
定格電源電圧 100V
定格電源周波数 50/60Hz
回転数(最大) 300,000rpm
ハンドピース 320,000rpm

【使用目的又は効果】

歯科補綴物、歯科用金属、歯科用陶材など、歯科技工上必要な研削、切削、トリミングなどをするとき使用する装置。

【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

1. 被切削物を準備する。
2. オーツフレックスミリングマシンへハンドピースを取付ける。
※オーツフレックスミリングマシン台座へ水受け用のタンクを取付ける。
3. 使用者は、防護用めがねを装着する。
4. 本体の電源コードの接続を行う。
5. 本体のスイッチを入れる。
6. マイクロモーター用フットスイッチを入れる。
7. 技工用バーに必要な回転数の調節を行う。
8. 被切削物をマイクロモーターハンドピースで切削する。
9. 使用後は、モーターを空回しの状態で放置することなく、必ずスイッチを切ること。
10. 完全使用後は、必ず電源コードをコンセントから抜くこと。

【使用上の注意】

1. 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。
2. 不明な点がある時は、必ず輸入元に問い合わせること。
3. 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時、機器の作動はすみやかに中止すること。
4. 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱をしないこと。
5. 使用後は、ハンドピースを空回しの状態で放置することなく、必ずスイッチを切ること。
6. 完全使用後は、必ず電源コードをコンセントから抜くこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL：052-799-4075

FAX：052-353-6610

製造業者：セーヤン社

Saeyang Micro Tech Co., Ltd.

韓国