

シェーラ プレミアム

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



成分：

硫酸カルシウム半水塩、その他

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石こう。

標準混合比：100g：20ml（粉：精製水）

作業時間：4.5～5.5分

硬化時間：30～40分

圧縮強度：60Mpa（1h後）

硬化膨張：0.10%（2h後）

【使用方法等】

- ①. 標準混水量、粉末100g：水20mlで行います。
- ②. ミキシングボウル内に粉末をいれ、次に水を加え均一になるまで手によって練和します。
- ③. 真空練和（バキュームミキサー）にて45秒間混合します。
- ④. 練和が完了したら印象に注入します。
- ⑤. バイブレーターを使用し、印象に注入を行います。
作業時間はおよそ4.5～5.5分。
- ⑥. 注入後およそ30～40分経過すれば、印象から硬化した模型を取り外すことができます。

【使用上の注意】

- ①. 本材は、記載の用途以外では使用しないこと。
- ②. 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ③. 本材、又は練和物が皮膚に付着した場合は、布又は紙などで拭き取り、石けんでよく洗浄すること。
- ④. 本材が万一眼に入った場合は、直ちに大量の流水で洗い流し、必ず眼科医の診断を受けて下さい。
- ⑤. 本材に対して、発疹や皮膚炎などの症状があらわれた使用者は、使用を直ちに中止し、医師の診断を受けて下さい。
- ⑥. 本材は、換気のよい作業所で使用すること。
- ⑦. 他の製品と混用しないこと。
- ⑧. 本品は単回使用とする。

【保管方法及び有効期間等】

- ①. 本材は、直射日光を避けて冷暗所に保管すること。
- ②. 本材は、歯科の従事者以外が触れることのないよう適切に保管・管理すること

使用期間：2年（有効期限はパッケージを確認下さい）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL：052-799-4075

FAX：052-353-6610

製造業者：シェーラ社

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG

ドイツ

取扱説明書を必ずご参照下さい