

拡大鏡用ミラー

【警告】


1. 使用目的に応じて使用すること。
2. 機器の使用の為に、注意事項を必ず守ること。

【禁忌・禁止】

1. 次亜塩素ナトリウム・塩化ベンザルコニウムホルマリン等は、鏡面・金属の腐食の原因となるため、使用しないこと。
2. 家庭用洗剤、磨き粉、金属ウール、金ブラシは、鏡面・金属の劣化、腐食の原因となるため使用しないこと。
3. 超酸化水（超酸性水）は、鏡面・金属の劣化、腐食の原因となるため使用しないこと。
4. 超音波洗浄器による洗浄は鏡面が剥離するため、使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成

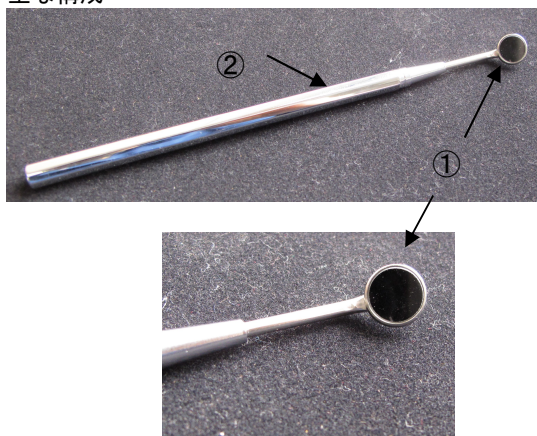

- ① ミラーヘッド
② 柄

【使用目的又は効果】

口腔内で歯を見るために用いる歯科用鏡。ミラーヘッドが小型なため、マイクロスコープ等などの拡大鏡を通して利用できる。

【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

- (1) 器具のめくれ、割れ・鏡面のキズ等の破損がないことを確認する。
- (2) 柄の部分を持ち、ミラーヘッド部分を口腔内に入れてマイクロスコープ等を利用して歯を見る。

【使用上の注意】

1. 使用後は、精製水を用いて器具に付着した、血液等を速やかに除去すること。
2. 洗浄・消毒・滅菌は、できるだけ精製水を使用すること。
3. 薬液を用いて消毒を行うときには、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を厳守すること。
4. 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器）を使用する時は、取扱説明書に準じて正しく行うこと。
5. 水分が付着したまま長時間放置すると、シミ・変色等の原因となるため、洗浄・消毒・滅菌後の器具は、水分を十分に除去し、乾燥、保管すること。

【推奨滅菌方法】

- ✓ 熱殺菌機は鏡面劣化の恐れがある為、使用しないで下さい。
- ✓ オートクレーブ滅菌は 134℃で 18 分間して下さい。
- ✓ 乾熱滅菌は 160℃にて行って下さい。
- ✓ 180℃以上の温度に晒すと、鏡面劣化の原因になります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 器具は、風通しの良い湿度の少ないところに保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL： 052-799-4075

FAX： 052-353-6610

製造業者：プロドント ホリガー社

PRODONT-HOLLIGER S. A. S

フランス