

歯 08 歯科用石膏及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石膏 JMDNコード: 70897020

シェーラ ゾツケル フルッシー

【形状・構造等及び原理等】

1. 形状



成分:

硫酸カルシウム半水塩、その他

【使用目的、効能又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石こう。

【品目仕様等】

標準混合比: 100g : 23ml (粉: 精製水)

作業時間: 3.5~4.5分

硬化時間: 35~45分

圧縮強度: 49Mpa (1h後)

硬化膨張: 0.05% (2h後)

硬度: 230Mpa (2h後)

【操作方法、使用方法等】

- ①. 標準混水量、粉末100g:水23mlで行います。
- ②. ミキシングボウル内に粉末をいれ、次に水を加えおよそ30秒間、均一になるまで手によって練和します。
- ③. 真空練和(バキュームミキサー)にて45秒間混合します。
- ④. 練和が完了したら印象に注入します。
- ⑤. バイブレーターを使用し、印象に注入を行います。作業時間はおよそ3.5~4.5分。
- ⑥. 注入後35~45分経過すれば、印象から硬化した模型を取り外すことができます。

【使用上の注意】

- ①. 本材は、記載の用途以外では使用しないこと。

- ②. 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ③. 本材、又は練和物が皮膚に付着した場合は、布又は紙などで拭き取り、石けんでよく洗浄すること。
- ④. 本材が万一眼に入った場合は、直ちに大量の流水で洗い流し、必ず眼科医の診断を受けて下さい。
- ⑤. 本材に対して、発疹や皮膚炎などの症状があらわれた使用者は、使用を直ちに中止し、医師の診断を受けて下さい。
- ⑥. 本材は、換気のよい作業所で使用すること。
- ⑦. 他の製品と混用しないこと。
- ⑧. 本品は単回使用とすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ①. 本材は、直射日光を避けて冷暗所に保管すること。
- ②. 高温・多湿を避けた場所に保管すること。
- ③. 本材は、歯科の従事者以外が触れることのないよう適切に保管・管理すること

使用期間: 2年 (有効期限はパッケージを確認下さい)

※密閉状態・乾燥状態

【包装】

1. 20kg

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: **名南歯科貿易株式会社**

住 所: 〒454-0805

名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

e-mail: meinan@meinandental.com

ホームページ: <http://www.meinandental.com>

外国製業者: シェーラ社(ドイツ)