

歯 08 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用硬質石膏 JMDN コード:70897020

シェーラ ゾッケッル フルッシー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



成分 :
硫酸カルシウム半水塩、その他

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石膏。

標準混合比 : 100g : 23ml (粉 : 精製水)

作業時間 : 3.5~4.5 分

硬化時間 : 35~45 分

圧縮強度 : 49Mpa (1h 後)

硬化膨張 : 0.05% (2h 後)

硬 度 : 230Mpa (2h 後)

【使用方法等】

- ①. 標準混水量、粉末 100g : 水 23ml で行います。
- ②. ミキシングボウル内に粉末をいれ、次に水を加えおよそ 30 秒間、均一になるまで手によって練和します。
- ③. 真空練和 (バキュームミキサー) にて 45 秒間混合します。
- ④. 練和が完了したら印象に注入します。
- ⑤. バイブレーターを使用し、印象に注入を行います。作業時間はおおよそ 3.5~4.5 分。
- ⑥. 注入後 35~45 分経過すれば、印象から硬化した模型を取り外すことができます。

【使用上の注意】

- ①. 本材は、記載の用途以外では使用しないこと。
- ②. 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ③. 本材、又は練和物が皮膚に付着した場合は、布又は紙などで拭き取り、石けんでよく洗浄すること。
- ④. 本材が万一眼に入った場合は、直ちに大量の流水で洗い流し、必ず眼科医の診断を受けて下さい。
- ⑤. 本材に対して、発疹や皮膚炎などの症状があらわれた使用者は、使用を直ちに中止し、医師の診断を受けて下さい。
- ⑥. 本材は、換気のよい作業所で使用すること。
- ⑦. 他の製品と混用しないこと。
- ⑧. 本品は単回使用とすること。

【保管方法及び有効期間等】

- ①. 本材は、直射日光を避けて冷暗所に保管すること。
- ②. 高温・多湿を避けた場所に保管すること。
- ③. 本材は、歯科の従事者以外が触れることのないよう適切に保管・管理すること。

使用期間 : 2 年 (有効期限はパッケージを確認下さい)

※密閉状態・乾燥状態

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 名南歯科貿易株式会社

TEL 052-799-4075

FAX 052-353-6610

製造業者 : SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG
ドイツ