

器具器械 36 医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット 31814000

コーク型ピンセット

【警告】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。

【禁忌・禁止】

本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造等】

1. 成分
ステンレス鋼



【使用目的又は効果】

歯科治療等で小物を掴んだり、挟んだりする時に使用する。

【使用方法等】

2つの先端部を近接させて(閉じて)、対象物を把持する。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 感染防止の為、防護グローブ、保護マスク、保護メガネを着用すること。
5. 使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とした後、高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。
6. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

住 所： 〒454-0805

名古屋市市中川区舟戸町2番26号

TEL： 052-799-4075

FAX： 052-353-6610

e-mail： meinan@meinandental.com

ホームページ：http://www.meinandental.com

製造業者：メデント社

MEDENTA Instruments Co

製造先国名：パキスタン